

fr **Stomahésive®**
poudre adhésive

Composition

1 g de poudre adhésive contient:

Carboxyméthylcellulose	
de sodium	333,3 mg
Pectine	333,3 mg
Gélatine	333,3 mg

Propriétés

La poudre adhésive Stomahésive se compose de pectine, gélatine et de sodium-carboxyméthylcellulose, trois substances totalement inertes. Elle forme une couche protectrice sur une peau humide: cette couche fait preuve d'excellentes qualités adhésives et est parfaitement bien tolérée. La poudre adhésive peut tout aussi bien être appliquée sur une peau fragilisée. Celle-ci quérît rapidement sous le film protecteur et lors de son enlèvement les cellules récemment formées ne sont pas endommagées.

Indications

Absorber l'humidité et protéger la peau des dommages et faciliter l'application des systèmes de stomathérapie.

À utiliser avec une colostomie, une iléostomie ou une urostomie.

Précautions

Ne pas appliquer la poudre adhésive Stomahésive directement sous le support de l'appareillage de stomie car ceci pourrait porter atteinte à une bonne adhérence.

Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez des patients ayant une sensibilité connue à Stomahésive® Poudre Protectrice ou à l'un de ses constituants.

Mode d'utilisation: laver et sécher soigneusement les mains. Appliquer la poudre en fine couche aussi souvent que nécessaire. En cas d'infection, consulter un médecin. Pour

de **Stomahésive®**
Adhäsivpulver



Wichtige Information, aufmerksam lesen.

Zusammensetzung

1 g Stomahésive Adhäsivpulver

enthält:

Natrium-	
Carboxymethylzellulose	333,3 mg
Pektin	333,3 mg
Gelatine	333,3 mg

Eigenschaften

Stomahésive Adhäsivpulver setzt sich zusammen aus Pektin, Gelatine und Natrium-Carboxymethylzellulose, drei völlig inertes Substanzen. Auf der feuchten Haut bildet es einen Schutzfilm, der sehr gute adhésive Eigenschaften aufweist und ausgezeichnet verträglich ist. Das Adhäsivpulver kann auch auf beeinträchtigter Haut aufgetragen werden. Die Haut kann unter dem Schutzfilm heilen und beim Entfernen des Films werden die neu gebildeten Zellen nicht beschädigt.

Anwendungsgebiete

Aufnahme von Feuchtigkeit und Schutz der Haut vor Schädigungen sowie Erleichterung der Anwendung von Stomasystemen.

Zur Verwendung bei Kolostomie, Ileostomie oder Urostomie.

Achtung: Das Stomahésive Adhäsivpulver soll nicht direkt unter dem Stomaversorgungssystem aufgetragen werden, da dies eine sichere Haftung beeinflussen kann.

Falls während der Verwendung dieses Geräts bzw. aufgrund seiner Verwendung ein schwerer Vorfall aufgetreten ist, dies dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde melden.

Nebenwirkungen,

Begleiterscheinungen

Keine bekannt.

Unverträglichkeiten und Risiken

Nicht verwenden wenn eine Überempfindlichkeit gegen die Paste selbst oder deren Bestandteile besteht.

enlever la poudre, nettoyer la peau avec de l'eau. Maintenir le capuchon fermé. Conserver à température comprise entre 10 et 30° C.

Posologie

La poudre adhésive Stomahésive peut être appliquée sur les parties irritées dépassant l'appareillage de stomie. En outre, pour une application directe sous l'appareillage la poudre adhésive Stomahésive peut être mélangée avec de la glycérine liquide.

DESTRUCTION DE LA POCHE

Manipuler et éliminer conformément aux pratiques médicales reconnues et aux lois et règlements locaux en vigueur.

Présentation

Flacon à saupoudrer de 25 g

Ranger hors de la portée des enfants!

OICM No. 39 342014



ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
1-800-422-8811

 ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park,
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

Deutschland 0800-78 66 200
Österreich 0800-216339
Česká republika 800122111
Suisse 0800-551110

 UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK

 ConvaTec International Services GmbH
Mühlentalstrasse 36/38
8200 Schaffhausen, Switzerland

© 2022 ConvaTec Inc.

®/™ est une marque déposée de ConvaTec inc.

®/™ bezeichnet eine Marke von ConvaTec Inc.

www.convatec.com

Anwendungshinweis: Hände waschen und gut abtrocknen. Das Pulver in einer dünnen Schicht so oft wie nötig auftragen. Bei Verdacht auf eine Infektion bitte den Arzt aufsuchen. Zur Entfernung mit Wasser abwaschen. Verschlusskappe fest verschließen. Lagerung zwischen 10-30° C.

Anwendung

Stomahésive Adhäsivpulver wird auf wunde Hautpartien, die über das Stomavesorgungssystem hinausgehen, verteilt. Zusätzlich kann das Stomahésive Adhäsivpulver für die direkte Anwendung unter der Versorgung auch mit Glycerin zu einer breiigen Masse vermischt werden.

ENTSORGUNG

Es muss gemäß allgemein anerkannter medizinischer Praxis sowie anwendbaren lokalen Gesetzen und Vorschriften gehandhabt und entsorgt werden.

Handelsformen


Flasche zu 25 g

Sorgfältig aufbewahren!

Vor Kindern sichern!

IKS Nr. 39 342014

 Dispositif médical / Medizinprodukt

 Contient une substance biologique d'origine animale / Enthält biologisches Material tierischen Ursprungs

 Importateur / Importeur

Revised 2022-02
CL1346VA