

CE
0123



ConvaMax™

Superabsorber Non-Adhesive

ConvaMax™ Apósito superabsorbente no adhesivo

INSTRUCCIONES DE USO

es ESPAÑOL

Descripción:

El apósito Superabsorbente ConvaMax™ no adhesivo es un apósito estéril para lesiones con exudado abundante, consistente en una capa no tejida permeable al aire e impermeable al agua con una capa de almohadilla superabsorbente. La estructura en tres capas facilita el manejo de fluido para proporcionar el ambiente de cura húmedo óptimo que promueve un cierre más rápido de la lesión. La almohadilla absorbente proporciona una absorción superior y bloquea el exudado. Ello minimiza el riesgo de maceración y de daños en la piel perilesional. El apósito Superabsorbente absorbe y retiene exudados y MMPs en el núcleo absorbente para reducir el riesgo de maceración y favorecer la cicatrización de la lesión.

Indicaciones:

Las indicaciones autorizadas para la utilización del apósito Superabsorbente ConvaMax™ no adhesivo con cargo a la financiación por el Sistema Nacional de Salud Español son las siguientes:
Úlceras Vasculares y Úlceras por Presión con exudado de moderado a abundante.

Instrucciones:

El apósito Superabsorbente puede ser utilizado por profesionales sanitarios y personas profanas no sanitarias bajo la supervisión de profesionales sanitarios.

1. Después de limpiar la lesión, colocar el apósito permitiendo suficiente espacio con el borde de la lesión.
2. El apósito Superabsorbente ConvaMax™ no adhesivo puede ser utilizado como apósito primario o secundario. Cuando se utiliza como primario, el apósito Superabsorbente ConvaMax™ no adhesivo debe estar en contacto íntimo con el lecho de la lesión para asegurar que el fluido es absorbido. La capa de contacto blanca deberá estar en contacto con la piel y la capa azul impermeable alejada del cuerpo.
3. Fije convenientemente con un vendaje de retención, adhesivo o un vendaje de compresión si es clínicamente apropiado.
4. La frecuencia de cambio de apósitos depende de la cantidad de exudado.
5. La retirada del apósito se puede facilitar humedeciéndolo con

solución salina.

6. Eliminar como un residuo normal. Si está contaminado, seguir las regulaciones locales.

Contraindicaciones:

1. No utilizar este producto en lesiones secas o con bajo nivel de exudado, ojos, membranas mucosas o en lesiones cavitadas debido a que el apósito aumenta de tamaño con la absorción. No utilizar en quemaduras de tercer grado.
2. El apósito Súper Absorbente ConvaMax™ no adhesivo no debería ser utilizado en personas con alergia o hipersensibilidad conocida al apósito o a sus componentes.
3. Lesiones con sangrado arterial o lesiones muy sangrantes.

Precaución:

1. No reutilizar. No utilice el apósito si el embalaje estéril está dañado o abierto.
2. No corte el apósito, la capa de cobertura debe permanecer intacta.
3. En ausencia de datos disponibles que respalden el uso de este apósito en grupos de población sensibles como bebés, niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y en ausencia de datos que indiquen lo contrario, en estos grupos de población este apósito debe utilizarse con precaución y siguiendo las recomendaciones de un médico.

Componentes:

Polipropileno y una capa absorbente de poliacrilato sódico.

Almacenamiento: Por favor, almacenar el producto en un lugar limpio, fresco y seco dentro del rango de temperatura especificado y evitando la luz solar.

Caducidad: 3 años desde la fecha de fabricación

Si se ha producido algún incidente grave en relación con el uso del apósito Superabsorbente no adhesivo ConvaMax™, debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro.

© 2025 Convatec


®/™ indica marcas de Convatec Inc.



No reutilizar



Fecha de caducidad

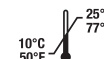

Límite de temperatura



Número de lote



Fecha de fabricación



Representante Autorizado en la Comunidad Europea



No usar si el embalaje está dañado y consulte las instrucciones de uso



Fabricante



Marcado CE con Identificación de Organismo Notificado



Producto sanitario



Referencia



Consulte las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónicas



No contiene látex de caucho natural



Mantener seco



Mantenerse alejado de la luz solar



Esterilizado utilizando óxido de etileno



Sistema de barrera estéril individual



Sistema de barrera estéril individual con embalaje protector exterior



No reesterilizar



País de fabricación



Símbolo de clasificación de envases para España.



Distribuidor



Importador



Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd
North Shangxia Rd. Dongjiang Hi-tech Industry Park
516005, Huizhou, P.R. China
Tel: +86-752-5302185



Shanghai International Holding Corp.
GmbH (Europe) Eiffestrasse 80
20537 Hamburg, Germany



Convatec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK



UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Østved
4320 LEJRE DENMARK

Importer:

Convatec International Services GmbH
Mühlentalstrasse 36/38
CH-8200 Schaffhausen

Spain 936023700