



nl NEDERLANDS

# STOMAHESIVE® HUIDPLAK

## Produktinformatie + Gebruiksaanwijzing



### STOMAHESIVE®

#### PRODUKTBESCHRIJVING:

- \* Stomahesive® is een beschermende “tweede huid”, opgebouwd uit huidvriendelijke materialen, namelijk: gelatine, pectine, natriumcarboxymethylcelulose en polyisobutyleen. De bovenzijde van de Stomahesive® huidplak bestaat uit een polyethyleenlaag, ondoorlaatbaar voor gassen, vloeistoffen e.d. Dit maakt baden en douchen met Stomahesive® mogelijk. De klevende onderzijde is afgedekt met beschermpapier.
- \* Stomahesive® is verkrijgbaar in plakken van 10 x 10 cm en 20 x 20 cm.

#### BEOOGD GEBRUIK

Bied bescherming voor peristomale huid door onregelmatigheden en depressies in de huid op te vullen, om de hechting van stomasystemen te verbeteren.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik met een colostoma, ileostoma of urostoma.

#### TOEPASSING:

- Bij wondbehandeling
- Bij fistelverzorging
- Ter bescherming van wondranden
- Huidbescherming onder fixatieplaatsen van drains, catheters e.d.
- Bij stomaverzorging.

(M.n. bij de stomaverzorging werd Stomahesive® vanaf de zeventiger jaren succesvol toegepast. Ondertussen heeft ConvaTec vele stoma-opvangmaterialen op basis van het huidvriendelijke Stomahesive® ontwikkeld. Bel voor een gratis proefpakket: 06-022 44 44 (gratis).

**ATTENTIE:** Wees zorgvuldig bij het gebruik van huidplakken bij een urinestoma op huidniveau, vooral bij mega-ureters of afwezigheid van een urinereservoir. Bij een zeer klein aantal klinische onderzoeken is de aanwezigheid van plakresten in het nierbekken aangetoond. Indien er plakresten in de urinewegen worden ontdekt, overleg met uw arts over verdere behandeling van uw stoma.

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Reinig de huid met lauw water en dep deze droog. Gebruik geen vette zalven of olieën. De Stomahesive® huidplak hecht op elke ondergrond, ook als de huid geïrriteerd of vochtig is.
2. Indien bij het verwisselen van de huidplak kleine restjes Stomahesive® op de huid zijn achter gebleven, hoeven deze niet volledig te worden verwijderd.
3. Huidplooien of oneffenheden van de huid kunnen eventueel worden opgevuld met Stomahesive® Pasta.
4. Knip de huidplak op maat.
5. Verwijder het beschermpapier en breng de Stomahesive® huidplak aan, voorkom onnodig aanraken van de klevende onderzijde.
6. Druk de Stomahesive® gedurende 30 seconden zachtjes aan om een goede hechting te krijgen.
7. Zonodig de randen afplakken met een huidvriendelijke pleister (DuoDERM Extra Thin) wanneer extra fixatie gewenst is.
8. Belangrijk: De draagtijd van de Stomahesive® huidplak is afhankelijk van de toepassing ervan. Stomahesive® kan tot 7 dagen gedragen worden, zolang de huidplak goed en comfortabel zit.
9. Verwijderen: Trek met één hand de plak zachtjes van boven naar beneden los. Ondersteun de vrijkomende huid met de andere hand.

Dit hulpmiddel is uitsluitend voor eenmalig gebruik en mag niet opnieuw worden gebruikt. Hergebruik kan een verhoogd risico op infectie of kruisbesmetting met zich meebrengen. Mogelijk zijn de fysieke eigenschappen van het hulpmiddel niet meer optimaal voor het beoogde gebruik.

Na gebruik kan dit product een potentieel biologisch risico zijn. Hanteren en weggooien in overeenstemming met geaccepteerde medische praktijk en toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is opgetreden, moet u dit melden aan de fabrikant en uw nationale instantie.

#### VERPAKKING:

| Afmeting   | Verpakt per | Bestelnummer |
|------------|-------------|--------------|
| 10 x 10 cm | 5           | 021713       |
| 20 x 20 cm | 3           | 021737       |

#### BEWAREN:

Droog bewaren op kamertemperatuur, niet in het volle licht.

© 2025 ConvaTec Inc.

®/™ indicates a trademark of ConvaTec Inc.



Niet opnieuw gebruiken



Consulteer de gebruiksaanwijzing



Voorzichtig



Medisch hulpmiddel



Importeur



Bevat biologisch materiaal van dierlijke oorsprong

ConvaTec Inc.  
Greensboro, NC 27409  
USA  
1-800-422-8811

Sponsored in Australia by:  
ConvaTec (Australia) Pty Ltd.  
1800 339 412 Australia  
0800 441 763 New Zealand

ConvaTec Limited  
First Avenue, Deeside Industrial Park  
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

UNOMEDICAL A/S  
Aaholmvej 1-3, Østed  
4320 LEJRE DENMARK

Imported by:  
DKSH Taiwan Ltd.  
10th Floor, No. 22, Lane 407,  
Tiding Blvd., Sec. 2,  
Neihu Technology Park, Taipei City 114,  
Taiwan, R.O.C

輸入販売元  
コンバテック ジャパン株式会社  
お客様相談窓口  
☎ 0120-532384

Australia  
België  
Bosna  
Canada  
Česká republika  
Chile  
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Egypt  
España  
France  
Hong Kong / 香港  
Hrvatska  
Ireland  
Israel  
Italia  
Kosovo  
Latvija  
Lietuva  
Luxemburg  
Magyarország  
Malaysia  
Nederland

1800 339 412  
02 3899742 or 0800-12011  
080020208  
1-800-465-6302  
800122111  
800-210-113  
48 167474  
0800-78 66 200  
8003030  
(2012) 3645495 / (2012) 5557478  
93 6023700  
0800 35 84 80  
852-25169182  
01/6121 624 / 0800 8000  
1 800 721721  
+ 972 3 9256712  
800 930 930  
044/ 116 722  
8000 5 333  
8-800-70001  
+32 2 3899742 or 0800-23157  
0680 201 201 (code: 1212)  
1-800-880-601  
0800-0224444 - stomazorgproducten  
0800 -0224460 - woundzorgproducten

New Zealand  
Norge  
Österreich  
Polska  
Portugal  
România  
Singapore  
Slovenija  
Slovensko  
South Africa  
Suisse  
Suomi  
Sverige  
Thailand  
Türkiye  
United Kingdom

0800-441-763  
80030995  
0800-216339  
0800 120 093  
800 20 1678  
+40 21 230 23 90  
65-62459838  
080 15 45  
0 800 122 111  
+27 (0)861 888 842  
0800-551110  
800179797  
08-704 72 50 Kundservice: 020-21 22 22  
66-2-2240060  
0216 416 52 00  
0800 282 254 - Ostomy Care  
0800 289 738 - Wound Therapeutics  
4006065576  
0800212240  
82-2-34536333  
☎ 0120-532384  
+7 800 200 80 99  
+7 800 200 80 99  
+7 800 200 80 99  
+7 800 200 80 99  
02/ 3 248 426 / 02/ 3 248 458  
0800 101 102  
0800 18 808

www.convatec.com

Revised 2025-11  
1001128V3