

# AQUACEL™ Foam Pro

## INSTRUCCIONES DE USO

es

ESPAÑOL

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El apósito AQUACEL™ Foam Pro es un apósito estéril de espuma de Hydrofiber™ para lesiones, que consiste en un film externo de poliuretano impermeable, una capa de espuma de poliuretano, una capa de Hydrofiber™ (carboximetilcelulosa sódica) y un adhesivo de silicona.

### USO PREVISTO

Los apósitos AQUACEL™ Foam Pro se pueden usar, bajo supervisión de un profesional sanitario. AQUACEL™ Foam Pro puede permanecer aplicado hasta un máximo de 7 días sin necesidad de cambio.

### INDICACIONES

Las indicaciones autorizadas para la utilización del producto con cargo a la financiación por el Sistema Nacional de Salud son las siguientes lesiones, con exudado y sin exudado:

- Úlceras vasculares
- Úlceras por presión

### CONTRAINDICACIONES

No se deben utilizar los apósitos AQUACEL™ Foam Pro en pacientes que son sensibles o han tenido una reacción alérgica al apósito o a los componentes anteriormente mencionados.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### 1. Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente (10 °C-25 °C/ 50 °F-77 °F). Proteger de la luz y mantener en ambiente seco.

La esterilidad está garantizada, a menos que el envase esté abierto o dañado antes del uso. Si el apósito o el envase están dañados o abiertos, no lo utilice.

Si se utiliza en una fecha posterior a la fecha de caducidad, no se pueden asegurar las propiedades del apósito.

#### 2. Preparación de la lesión y limpieza de la piel:

Antes de aplicar el apósito, limpie la zona con un limpiador para lesiones adecuado, y seque la piel circundante. Los apósitos AQUACEL™ Foam Pro no son compatibles con productos oleosos.

#### 3. Preparación y aplicación del apósito:

- Elija un tamaño de apósito que asegure que la almohadilla absorbente central sea por lo menos 1 cm (1/3 pulgada) mayor que el área de la lesión.
- Retire el apósito del envase estéril. Retire el revestimiento desplegable minimizando el contacto de los dedos con la superficie adhesiva.
- Sostenga el apósito sobre la lesión y alinee el centro del apósito con el centro de la lesión.
- Asegúrese de que el apósito no se estire en la aplicación. Alise el borde del adhesivo. Asegúrese de que las articulaciones estén suficientemente flexionadas como para permitir la movilidad del paciente. Se puede cortar el apósito. Si lo hace, se debe utilizar esparadrapo adhesivo o un film adicional para sellar y asegurar una barrera antibacteriana.

#### 4. Retirada del apósito:

AQUACEL™ Foam Pro puede permanecer aplicado hasta un máximo de 7 días sin necesidad de cambio.

- Cambie el apósito cuando esté clínicamente indicado o cuando el apósito esté dañado/manchado.
- Para retirar el apósito, presione suavemente sobre la piel y levante con cuidado una esquina del apósito y continúe hasta que todas las esquinas se hayan despegado. Levante con cuidado el apósito y deséchelo según los protocolos clínicos locales.

### PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES

Este apósito es para un solo uso y no debe reutilizarse. Si lo reutiliza, puede aumentar el riesgo de infección o contaminación cruzada, y es posible que las propiedades físicas del apósito no sean óptimas para el uso previsto. Este apósito no debe utilizarse con otros productos para el cuidado de lesiones sin consultar antes a un profesional sanitario.

En el caso de lesiones con exudado elevado, se puede utilizar AQUACEL™ Foam Pro como apósito secundario junto con un apósito primario. Los apósitos AQUACEL™ Foam Pro son impermeables; sin embargo, no se deben sumergir cuando se bañe o nade. Los apósitos AQUACEL™ Foam Pro no son compatibles con agentes oxidantes, como agua oxigenada o soluciones de hipoclorito.

Consulte a un profesional sanitario si observa algunos de estos efectos secundarios durante el cambio de apósito: irritación (enrojecimiento, inflamación), maceración (blanqueamiento de la piel), hipergranulación (formación excesiva de tejidos), signos de infección (aumento de dolor, sangrado, calor/rubor en el tejido perilesional, exudado de la lesión) o algún cambio en el color u olor de la lesión.

Fabricado en el Reino Unido.

© 2021 ConvaTec Inc.

®/™ indica una marca registrada de ConvaTec Inc. AQUACEL, el logo de AQUACEL y Hydrofiber son marcas registradas.



No reutilizar



No utilizar si el envase está dañado



Consulte las instrucciones de uso




Precaución



Mantenerse alejado de la luz solar



Mantener seco

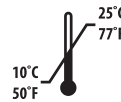

Límite de temperatura



No contiene látex de caucho natural



Referencia



Fecha de caducidad



Número de lote



Fabricante



Esterilizado utilizando óxido de etileno






Representante Autorizado en la Europea



Importador

ConvaTec Inc.  
Greensboro, NC 27409  
USA  
1-800-422-8811

 ConvaTec Limited  
First Avenue, Deeside Industrial Park  
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

 UNOMEDICAL A/S  
 Aaholmvej 1-3, Osted  
4320 LEJRE DENMARK

España 93 6023700