

# COMBIHESIVE® 2S

## Support Modelable avec adhésif hydrocolloïde

### MODE D'EMPLOI



Ne pas réutiliser



Contient une substance biologique d'origine animale



Mise en garde



Consulter le mode d'emploi

### CONDITIONS DE CONSERVATION



Dispositif médical



Importateur

### DESCRIPTION DU PRODUIT

L'ouverture du support cutané Modelable Combihesive® 2S peut être modelée à la forme et à la taille de la stomie sans avoir besoin d'un guide de mesure ou de ciseaux. Ce support cutané modelable contient de la gomme Stomahesive® qui est en contact avec la peau péristomiale et la stomie. La partie du support cutané qui n'est pas en contact avec la peau péristomiale contient de la gomme Durahesive®. Ce dispositif fait partie d'un système deux-pièces d'appareillage de stomathérapie et doit être utilisé avec la poche Combihesive® 2S.

### INDICATIONS

Pour le recueil des effluents.

**Utilisation prévue:** Gestion de l'évacuation stomiale.

**Indications:** À utiliser avec une colostomie, une iléostomie ou une urostomie.

### PRECAUTIONS ET OBSERVATIONS

**ATTENTION:** Une attention particulière doit être portée lors de l'utilisation de produits adhésifs autour d'une urétérostomie, particulièrement dans le cas de méga-uretère et en l'absence de réservoir urinaire. Les dossiers cliniques rapportent rarement la présence d'adhésif dans le système urinaire des patients. Cependant si la présence d'adhésif est détectée dans le système urinaire, il faut reconsidérer l'utilisation continue de ce produit et mettre en place le traitement approprié.

Ce dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé. Toute réutilisation peut entraîner un risque accru d'infection ou de contamination croisée.

Les propriétés physiques du dispositif risquent de ne plus être optimales pour l'usage prévu.

Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.


**Remarque:** En cas d'irritation, cesser l'utilisation et consulter un professionnel de santé.

### MODE D'EMPLOI

#### PRÉPARATION DU SUPPORT CUTANÉ

Vos mains et la peau péristomiale **doivent** être propres, sèches et dépourvues de tout solvant ou substances grasses. Avant toute préparation du support cutané, lire ce chapitre afin de vous familiariser avec son mode d'emploi.

1. Assurez-vous de sélectionner la taille appropriée du support protecteur cutané Modelable Combihesive® 2S.
2. Ouvrir l'emballage individuel du support cutané et en retirer le support cutané. Ne pas enlever le papier calque ou le papier siliconé blanc du protecteur cutané à ce stade.

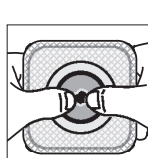

3. Pour personnaliser l'ouverture du support, placer vos pouces (ou doigts) sur le trou central et commencer à rouler le protecteur cutané en arrière. Utiliser vos pouces (ou doigts) pour continuer à rouler le protecteur cutané jusqu'à la création d'une ouverture avec la forme et la taille souhaitées.

**Remarque:** Il est recommandé d'appliquer le support cutané immédiatement après son modelage. L'utilisation de ciseaux n'est pas recommandée.


Après avoir modelé l'ouverture du support, enlever le papier calque du support cutané et procéder immédiatement à son application. **Ne pas enlever le papier siliconé blanc à ce stade.**

#### APPLICATION DU SUPPORT CUTANÉ


Vos mains et la peau péristomiale doivent être propres, sèches et dépourvues de tout solvant ou substances grasses.




1. Centrer l'ouverture du support sur la stomie et appuyer pour le mettre en place.

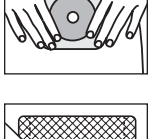

2. Si nécessaire, remodeler le support cutané vers la stomie afin d'ajuster parfaitement le support cutané à la stomie. Lisser le bord interne (le plus près de la stomie) dans un mouvement circulaire pour garantir une bonne adhérence du support cutané sur la peau.

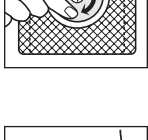

3. Maintenir en place le support cutané pendant au moins 30 secondes.

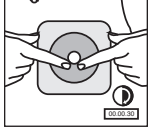

4. Enlever le papier siliconé blanc et appliquer l'adhésif souple en évitant la formation de plis.


#### APPLICATION DE LA POCHE

S'assurer du choix approprié de la taille de la poche Combihesive® 2S.



Avant d'appliquer la poche, faire pénétrer une petite quantité d'air en l'étirant délicatement comme illustré.

Attacher la poche adéquate au support cutané comme suit:

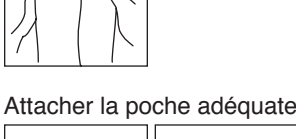

Pour assurer l'emboîtement presser la poche tout autour du support cutané. Plusieurs clics peuvent être entendus.


## POUR LES POCHE VIDABLES AVEC FILTRES



Vous devez protéger les ouvertures du filtre avec les pastilles autocollantes fournies, lorsque vous vous baignez (bains, douches ou natation). N'oubliez pas d'enlever ces pastilles après la fin de ces activités et dès que la poche est sèche.

**REMARQUE :** Le filtre peut ne pas fonctionner correctement s'il est humide.

### RETRAIT DE LA POCHE

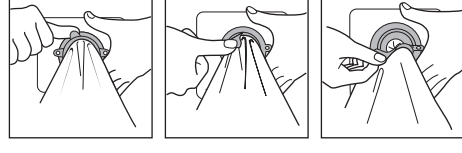

### RETRAIT DU SUPPORT CUTANE




Pour retirer le support protecteur cutané de la peau, maintenir la peau d'une main et décoller le support de l'autre.

### UTILISATION DU SYSTEME DE FERMETURE

#### INVISICLOSE® FERMETURE DE LA POCHE:

Le système de fermeture InvisiClose® (1) est constitué d'un rabat de sécurité (A), d'un dispositif de verrouillage (B) et d'une fermeture élastique (C).

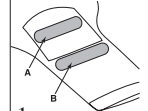

Relever le rabat de sécurité vers le haut de la poche pour découvrir le dispositif de verrouillage. (2)



Replier quatre fois en remontant l'extrémité de la manchette vers vous, jusqu'à mettre en contact les bandes à picots du dispositif de verrouillage (3)



Presser les bandes à picots du dispositif de verrouillage l'une sur l'autre pour finaliser l'arrimage jusqu'à ce que vous entendiez le clic de fermeture. Faire glisser les doigts sur toute la longueur du dispositif pour un arrimage complet. (4)



Passer le rabat de sécurité autour du bas de la poche et presser les bandes à picots jusqu'à ce que vous les sentiez verrouiller (clic). (5)



#### VIDANGE DE LA POCHE:

Relever le bas de la poche vers vous. Dégrafer avec précaution le rabat de sécurité. (6)



Maintenir ensuite le rabat de sécurité vers le haut et déverrouiller le dispositif de fermeture en commençant par un coin (7) et dérouler la manchette en quatre fois. (8)




Pour faciliter la vidange et/ou le nettoyage, vous pouvez ouvrir la manchette en appuyant sur l'extrémité des bandes de fermeture élastique avec le pouce et l'index. (9)




Si vous le souhaitez, la manchette peut-être nettoyée à l'eau et au savon, rincée puis essuyée.

#### UTILISATION DU CLAMP DROIT:

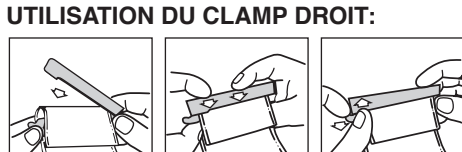

#### UTILISATION DU CLAMP INCURVE:

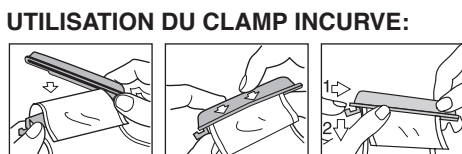

#### UTILISATION DU ROBINET DE VIDANGE ACCUSEAL®:




Raccordement à un collecteur de nuit:



#### UTILISATION DU TUBE DE VIDANGE:



Raccordement à un collecteur de nuit:

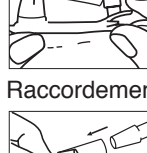


Ce produit peut rester en place tout en se baignant, se douchant, ou nageant. Pour des poches avec un filtre, couvrir les ouvertures du filtre avec les pastilles fournies. L'essuyer après une exposition à l'eau.

#### DESTRUCTION:

Après utilisation, ce produit peut présenter un danger biologique potentiel. Manipuler et éliminer conformément aux pratiques médicales reconnues et aux lois et règlements locaux en vigueur.

Pour toute information complémentaire sur les produits ConvaTec, nous contacter à l'adresse ci-dessous.

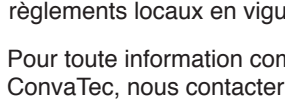

ConvaTec Inc.  
Greensboro, NC 27409  
1-800-422-8811



UNOMEDICAL A/S  
Aaholmvej 1-3, Osted  
4320 LEJRE DENMARK

France 0800 35 84 80

ConvaTec Limited  
First Avenue, Deeside Industrial Park  
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

www.convatec.com

© 2022 ConvaTec Inc.

®/™ indicates a trademark of ConvaTec Inc.