



Stomahesive® Adhäsivpaste Stomahésive® pâte adhésive

(de)

Zusammensetzung:

1 g Stomahesive Adhäsivpaste enthält:

Natrium-Carboxymethylzellulose

165.8 mg

Pektin

165.8 mg

Gelatine

165.8 mg

Plastibase®

ad 1 g

Zweckbestimmung:

Aufnahme von Feuchtigkeit und Schutz der Haut vor Schädigungen.

Vorgesehene Anwender:

Medizinische Fachkräfte, Pflegepersonen und Stoma-Patienten.

Indikationen:

Zur Verwendung bei Kolostomie, Ileostomie oder Urostomie.

Anwendung:

Stomahesive Adhäsivpaste wird zum Schutz der peristomalen Haut bei Ileo, Kolo- und Urostomien, sowie bei Hautfisteln eingesetzt.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Warnhinweis:

Nicht zum Abdecken offener Wunden benutzen.

Falls während der Verwendung dieses Geräts bzw. aufgrund seiner Verwendung ein schwerer Vorfall aufgetreten ist, dies dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde melden.

Anwendungshinweise:

1. Tupfen Sie eine kleine Menge Orabase Paste auf den betroffenen Bereich.
2. Tragen Sie die Paste nicht zu dick auf; der Überschuss löst sich ab und legt die Haut frei.
3. Wiederholen Sie das Auftragen der Paste so oft wie nötig; oder verwenden Sie die Paste wie von einem Arzt verordnet.

ENTSORGUNG

Bitte beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Packungsgröße:

Tube zu 30 g

IKS Nr. 39341018

(fr)

Composition:

1 g de pâte adhésive Stomahésive contient:

Carboxyméthylcellulose de sodium

165.8 mg

Pectine

165.8 mg

Gélatine

165.8 mg

Plastibase®

ad 1

Utilisation prévue :

Absorber l'humidité et protéger la peau des dommages et faciliter l'application des systèmes de stomathérapie.

Utilisateurs ciblés :

Professionnels de santé, soignants et personnes stomisées.

Mode d'emploi :

À utiliser avec une colostomie, une iléostomie ou une urostomie.

Indications :

La pâte adhésive Stomahésive est destinée à aider à protéger la peau péristomiale autour des iléo-, des colo- et urostomies et des fistules.

Contre-indications :

Aucune n'est connue.

Précautions :

Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes.

Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

Mode d'emploi:

1. Tamponner une petite quantité de pâte Orabase sur la zone concernée.
2. Ne pas appliquer la pâte trop généreusement ; l'excédent se décollera, laissant la peau exposée.
3. Appliquer à nouveau aussi souvent que nécessaire ; ou utiliser comme indiqué par le médecin.

DESTRUCTION

Suivre les instructions locales de destruction.

Présentation:

Tubes de 30 g

OICN No. 39341018

Vertrieb durch: / Distribué par:

ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
1-800-422-8811



ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

Deutschland 0800-78 66 200
Österreich 0800-216339
Schweiz 0800-551110

CH REP



ConvaTec International Services GmbH
Mühlentalstrasse 36/38
8200 Schaffhausen, Switzerland

EC REP




UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Østed
4320 LEJRE DENMARK



Medizinprodukt /
Dispositif médical



Enthält biologisches Material
tierischen Ursprungs /
Contient une substance
biologique d'origine animale

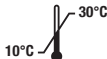

30°C
Temperaturgrenze /
Limites de température



Importeur / Importateur

© 2022 ConvaTec Inc.

®/™ Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer / Toutes les
marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs

Revised 2022-02
CL1345VB