

4) Dopo aver praticato il foro, asportare il foglio di carta protettiva e applicare il sacchetto esercitando una leggera pressione intorno allo stoma.

5) Per rimuovere il sacchetto, staccare delicatamente dall'alto verso il basso e contemporaneamente esercitare una leggera pressione sulla cute con la mano libera.

Confezioni disponibili

STOMADRESS® PLUS

Scatola da 30 minisacchetti post-irrigazione con barriera totale Stomahesive e nuovo filtro incorporato.

Diametro: 19/50 mm

Il presente dispositivo è esclusivamente monouso e non deve essere riutilizzato. Il riutilizzo può comportare un aumento del rischio di infezioni o di contaminazione crociata. Il riutilizzo può rendere le proprietà fisiche del dispositivo non più ottimali per l'uso previsto.

Dopo l'uso, il prodotto può rappresentare un potenziale rischio biologico. Maneggiare e smaltire il prodotto in conformità con le prassi mediche accettate e con tutte le leggi e le normative locali applicabili.

Se, durante l'uso di questo dispositivo o in conseguenza del suo utilizzo, si verificasse un inconveniente grave, segnalare la problematica al produttore e all'autorità nazionale competente.

SMALTIMENTO

Per lo smaltimento, attenersi alle normative locali.

Distribuito da:
ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409

www.convatec.com
Italia 800 930 930

 ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

 UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK

Revised 2022-05
1026065V2



 ITALIANO

STOMADRESS® PLUS

Minisacchetto post-irrigazione con barriera totale Stomahesive, nuovo filtro incorporato e foro centrale da allargare da 19 a 50 mm.

ISTRUZIONI PER L'USO



Contiene materiale biologico di origine animale



Dispositivo medico



Importatore


 ConvaTec

 ConvaTec


Stomadress Plus® è il minisacchetto post-irrigazione con barriera protettiva totale, nuovo filtro incorporato e foro centrale da allargare da 19 a 50 mm.

Descrizione del prodotto

Stomadress Plus® è un minisacchetto ad un pezzo, realizzato appositamente per i colostomizzati che si irrigano.

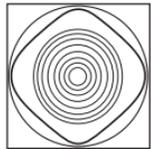

- 1) La barriera totale Stomahesive garantisce la massima protezione.

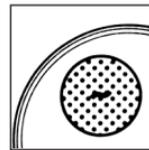

- 2) Il minisacchetto è dotato di un nuovo filtro incorporato che permette una più efficace deodorazione dei gas, che vengono quindi completamente eliminati.

- 3) Per assicurare la massima tranquillità in caso di eventuali secrezioni, la parte interna del sacchetto è costituita da uno speciale materiale superassorbente.
- 4) Il foro già praticato nel sacchetto può essere allargato in modo da adattarlo perfettamente alla forma e alla grandezza dello stoma.

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1) Assicurarsi che la pelle intorno allo stoma sia pulita e asciutta.
- 2) Misurare il diametro dello stoma.



- 3) Seguendo le linee già stampate sulla carta protettiva e utilizzando forbici a punta rotonda, praticare un foro con diametro superiore di circa 3 mm a quello dello stoma;

NON TAGLIARE OLTRE L'ULTIMA LINEA (50 MM).