

COMBIHESIVE® 2S


Support cutané Convexe Modelable en Durahesive®

Mode d'emploi

 ConvaTec



CONDITIONS DE STOCKAGE

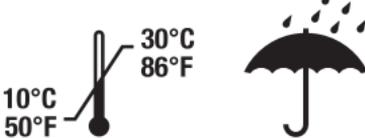

MD Dispositif médical

LOT Numéro de lot

DESCRIPTION

Le support Combihesive® 2S Convexe Moldable en Durahesive® est un support qui peut être modelé à la taille et aux contours de la stomie avec les doigts – sans utilisation de ciseaux. Le support Combihesive® 2S Convexe Modelable en Durahesive® doit être utilisé avec les poches.

INDICATIONS

Pour le recueil des effluents.

Utilisation prévue: Gestion de l'évacuation stomiale.

Indications: À utiliser avec une colostomie, une iléostomie ou une urostomie.

PRECAUTIONS ET OBSERVATIONS

ATTENTION: Une attention particulière doit être portée lors de l'utilisation de produits adhésifs autour d'une urétérostomie, particulièrement dans le cas de mega-uretères et en l'absence de réservoir urinaire. Les dossiers cliniques rapportent rarement la présence d'adhésif dans le système urinaire des patients. Cependant si la présence d'adhésif est détectée dans le système urinaire, il faut reconsidérer l'utilisation continue de ce produit et mettre en place le traitement approprié.

ATTENTION: Utiliser avec prudence en présence d'une insuffisance circulatoire connue au niveau de la stomie et/ou de la peau péristomiale.

Ce dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé. Toute réutilisation peut entraîner un risque accru d'infection ou de contamination croisée. Les propriétés physiques du dispositif risquent de ne plus être optimales pour l'usage prévu.


Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

REMARQUE: En cas d'irritation, cesser l'utilisation et consulter un professionnel de santé.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT CUTANÉ

La peau péristomiale **doit** être propre et sèche. Éviter toute utilisation de solvant ou de substances grasses.

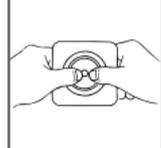


Avant toute utilisation, lire le mode d'emploi.

1. Mesurer votre stomie à l'aide du guide de mesure et choisir un support Combihesive® 2S Convexe Modelable adapté.
2. Ouvrir le blister en retenant sa partie transparente. Utiliser un stylo ou un marqueur pour tracer les contours de la stomie sur la partie transparente du blister. Vous pouvez couper le tracé et l'utiliser comme modèle pour les prochaines utilisations. Vérifier le tracé périodiquement afin de suivre tout changement de taille ou de forme de la stomie. Ce modèle sera utilisé pour tracer les contours de la stomie sur la face interne du support afin de vous aider à modeler l'ouverture du support à la taille et à la forme de la stomie.
3. Rappporter le tracé de votre stomie sur le papier plastique du support Combihesive® 2S Convexe Modelable. Après quelques utilisations vous pourrez modeler le support cutané sans avoir recours au tracé.
4. Prendre le support avec la zone d'application transparente face à vous. Repousser la partie centrale du papier plastique. Cette étape vous aidera à modeler le support cutané.
5. Pour personnaliser l'ouverture du support cutané, poser vos pouces sur le trou central et **rouler** le support cutané pour le façonner aux contours et à la forme de la stomie. Ce support cutané est modelable – se modèle à la forme et à la taille de la stomie avec les doigts. **L'utilisation des ciseaux n'est donc pas conseillée.**

Après avoir modelé le support cutané, enlever le papier plastique. **Ne pas enlever le papier siliconé du support à ce moment-là.**

APPLICATION DU SUPPORT CUTANÉ

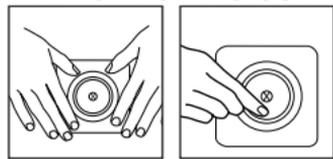

1. Centrer l'ouverture du support sur la stomie et appuyer pour le mettre en place.
2. Lisser le bord interne (le plus près de la stomie) avec les doigts pendant 30 secondes pour garantir une bonne adhérence autour de la stomie.
3. Enlever le papier siliconé du support. Appliquer l'adhésif souple en évitant la formation de plis.


APPLICATION DE LA POCHE

Choisir une poche de taille appropriée au support cutané et adaptée aux effluents.

Avant d'appliquer la poche, faire pénétrer une petite quantité d'air en l'étirant délicatement, comme illustré.




Appliquer la poche correspondante sur le support comme indiqué ci-dessous :

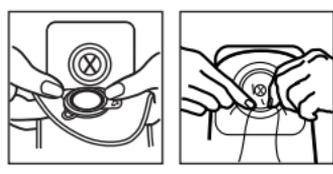

Pour assurer l'emboîtement presser tout autour du support cutané. Plusieurs "clac" doivent être entendus.

RETRAIT DE LA POCHE

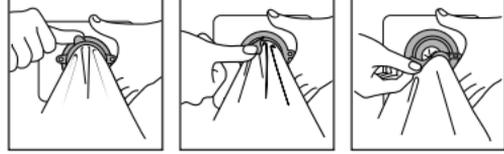


RETRAIT DU SUPPORT CUTANÉ



Pour retirer le support cutané de la peau, maintenir la peau d'une main et décoller le support de l'autre.

UTILISATION DU SYSTÈME DE FERMETURE INVICLOSE™


FERMETURE DE LA POCHE:

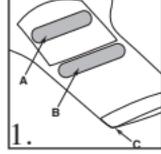


Le système de fermeture InvisiClose (1) est constitué d'un rabat de sécurité (A), d'un dispositif de verrouillage (B) et d'une fermeture élastique (C).




Relever le rabat de sécurité vers le haut de la poche pour découvrir le dispositif de verrouillage. (2)

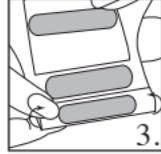

Replier l'extrémité de la manchette vers vous, en remontant quatre fois jusqu'à mettre en contact les bandes à picots du dispositif de verrouillage. (3)

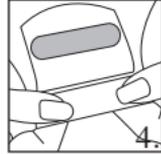

Presser les bandes à picots du dispositif de verrouillage l'une sur l'autre pour finaliser l'arrimage. Faire glisser les doigts sur toute la longueur du dispositif pour un arrimage complet. (4)

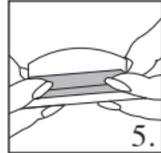


Passer le rabat de sécurité autour du bas de la poche et presser les bandes à picots du dispositif de verrouillage. (5)

VIDANGE DE LA POCHE:



Relever le bas de la poche vers vous. Dégrafer avec précaution le rabat de sécurité. (6)

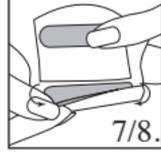


Maintenir ensuite le rabat de sécurité vers le haut et déverrouiller le dispositif de fermeture en commençant par un coin. (7) Dérouler la manchette en quatre fois. (8)



Pour faciliter la vidange et/ou le nettoyage, vous pouvez ouvrir la manchette en appuyant sur l'extrémité des bandes de fermeture élastique avec le pouce et l'index. (9)

Si vous le souhaitez, la manchette peut être nettoyée à l'eau et au savon, rincée, puis essuyée.

UTILISATION DU CLAMP DE FERMETURE

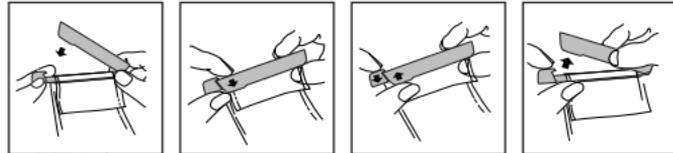


Si une poche vidable est utilisée, vérifier que le clamp de fermeture est en place.


UTILISATION DU ROBINET DE VIDANGE ACCUSEAL®



Raccordement au collecteur de nuit:

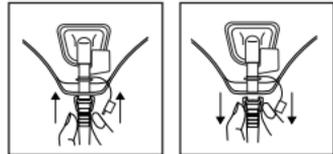

UTILISATION DU TUBE DE VIDANGE

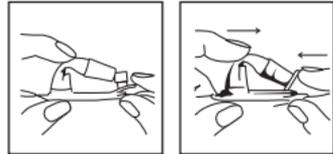

Raccordement au collecteur de nuit:



DESTRUCTION

Après utilisation, ce produit peut présenter un danger biologique potentiel. Manipuler et éliminer conformément aux pratiques médicales reconnues et aux lois et règlements locaux en vigueur.

Pour plus d'informations sur les produits ConvaTec, nous contacter à l'adresse ci-dessous.



ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
1-800-422-8811



UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK



France 0800 35 84 80

ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

www.convatec.com

© 2021 ConvaTec Inc.

®/™ indicates a trademark of ConvaTec Inc.