

STOMAHESIVE® HUIDPLAK

Produktinformatie

+

Gebruiksaanwijzing



STOMAHESIVE®

PRODUKTBESCHRIJVING:

- * Stomahesive® is een beschermende “tweede huid”, opgebouwd uit huidvriendelijke materialen, namelijk: gelatine, pectine, natriumcarboxymethylcellulose en polyisobutyleen. De bovenzijde van de Stomahesive® huidplak bestaat uit een polyethyleenlaag, ondoorlaatbaar voor gassen, vloeistoffen e.d. Dit maakt baden en douchen met Stomahesive® mogelijk. De klevende onderzijde is afgedekt met bescherm papier.
- * Stomahesive® is verkrijgbaar in plakken van 10 x 10 cm en 20 x 20 cm.

BEOOGD GEBRUIK

Bied bescherming voor peristomale huid door onregelmatigheden en depressies in de huid op te vullen, om de hechting van stomasystemen te verbeteren.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik met een colostoma, ileostoma of urostoma.

TOEPASSING:

- Bij wondbehandeling
 - Bij fistelverzorging
 - Ter bescherming van wondranden
 - Huidbescherming onder fixatieplaatsen van drains, catheters e.d.
 - Bij stomaverzorging.
- (M.n. bij de stomaverzorging werd Stomahesive® vanaf de zeventiger jaren succesvol toegepast. Ondertussen heeft ConvaTec vele stoma-opvangmaterialen op basis van het huidvriendelijke Stomahesive® ontwikkeld. Bel voor een gratis proefpakket: 06-022 44 44 (gratis).

ATTENTIE: Wees zorgvuldig bij het gebruik van huidplakken bij een urinestoma op huidniveau, vooral bij mega-ureters of afwezigheid van een urinereservoir. Bij een zeer klein aantal klinische onderzoeken is de aanwezigheid van plakresten in het nierbekken aangetoond. Indien er plakresten in de urinewegen worden ontdekt, overleg met uw arts over verdere behandeling van uw stoma.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Reinig de huid met lauw water en dep deze droog. Gebruik geen vette zalven of olieën. De Stomahesive® huidplak hecht op elke ondergrond, ook als de huid geïrriteerd of vochtig is.
2. Indien bij het verwisselen van de huidplak kleine restjes Stomahesive® op de huid zijn achter gebleven, hoeven deze niet volledig te worden verwijderd.
3. Huidplooien of oneffenheden van de huid kunnen eventueel worden opgevuld met Stomahesive® Pasta.
4. Knip de huidplak op maat.
5. Verwijder het bescherm papier en breng de Stomahesive® huidplak aan, voorkom onnodig aanraken van de klevende onderzijde.
6. Druk de Stomahesive® gedurende 30 seconden zachtjes aan om een goede hechting te krijgen.
7. Zonodig de randen afplakken met een huidvriendelijke pleister (DuoDERM Extra Thin) wanneer extra fixatie gewenst is.
8. Belangrijk: De draagtijd van de Stomahesive® huidplak is afhankelijk van de toepassing ervan. Stomahesive® kan tot 7 dagen gedragen worden, zolang de huidplak goed en comfortabel zit.
9. Verwijderen: Trek met één hand de plak zachtjes van boven naar beneden los. Ondersteun de vrijkomende huid met de andere hand.

Dit hulpmiddel is uitsluitend voor eenmalig gebruik en mag niet opnieuw worden gebruikt. Hergebruik kan een verhoogd risico op infectie of kruisbesmetting met zich meebrengen. Mogelijk zijn de fysieke eigenschappen van het hulpmiddel niet meer optimaal voor het beoogde gebruik.

Na gebruik kan dit product een potentieel biologisch risico zijn. Hanteren en weggooiën in overeenstemming met geaccepteerde medische praktijk en toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

Indien tijdens het gebruik van dit hulpmiddel of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is opgetreden, moet u dit melden aan de fabrikant en uw nationale instantie.

VERPAKKING:




Afmeting	Verpakt per	Bestelnummer
10 x 10 cm	5	21713
20 x 20 cm	3	21737

BEWAREN:

Droog bewaren op kamertemperatuur, niet in het volle licht.

© 2022 ConvaTec Inc.

®/™ indicates a trademark of ConvaTec Inc.

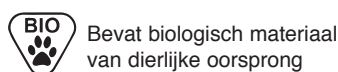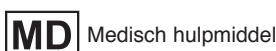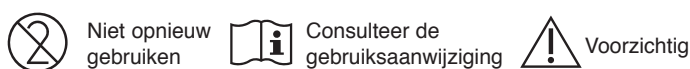

ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
USA
1-800-422-8811

Sponsored in Australia by:
ConvaTec (Australia) Pty Ltd.
1800 339 412 Australia
0800 441 763 New Zealand

ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Østed
4320 LEJRE DENMARK

Imported by:
DKSH Taiwan Ltd.
10th Floor, No. 22, Lane 407,
Tiding Blvd., Sec. 2,
Neihu Technology Park, Taipei City 114,
Taiwan, R.O.C

輸入販売元
コンバテック ジャパン株式会社
お客様相談窓口
☎ 0120-532384

Australia	1800 339 412
België	02 3899742 or 0800-12011
Bosna	080020208
Canada	1-800-465-6302
Česká republika	800122111
Chile	800-210-113
Danmark	48 167474
Deutschland	0800-78 66 200
Eesti	8003030
Egypt	(2012) 3645495 / (2012) 5557478
España	93 6023700
France	0800 35 84 80
Hong Kong / 香港	852-25169182
Hrvatska	01/6121 624 / 0800 8000
Ireland	1 800 721721
Israel	+ 972 3 9256712
Italia	800 930 930
Kosovo	044/ 116 722
Latvija	8000 5 333
Lietuva	8-800-70001
Luxemburg	+32 2 3899742 or 0800-23157
Magyarország	0680 201 201 (code: 1212)
Malaysia	1-800-880-601
Nederland	0800-0224444 - stomazorgproducten 0800 -0224460 - woundzorgproducten
New Zealand	0800-441-763
Norge	80030995
Österreich	0800-216339
Polska	0800 120 093
Portugal	800 20 1678
România	+40 21 230 23 90
Singapore	65-62459838
Slovenija	080 15 45
Slovensko	0 800 122 111
South Africa	+27 (0)861 888 842
Suisse	0800-551110
Suomi	800179797
Sverige	08-704 72 50 Kundenservice: 020-21 22 22
Thailand	66-2-2240060
Türkiye	0216 416 52 00
United Kingdom	0800 282 254 - Ostomy Care 0800 289 738 - Wound Therapeutics
中国	4006065576
台灣 / 台湾	0800212240
한국	82-2-34536333
日本	☎ 0120-532384
Россия	+7 800 200 80 99
Беларусь	+7 800 200 80 99
Україна	+7 800 200 80 99
Қазақстан	+7 800 200 80 99
Македонија	02/ 3 248 426 / 02/ 3 248 458
Српска и Црна Гора	0800 101 102
България	0800 18 808