

CE  
0123

 ConvaTec

# ConvaMax™ SUPERABSORBER

ConvaMax™ Apósito súperabsorbente adhesivo

## INSTRUCCIONES DE USO

ES ESPAÑOL

### Descripción:

El apósito Súperabsorbente ConvaMax™ adhesivo con una capa de silicona es un apósito estéril para uso en lesiones con exudado abundante consistente en una capa no tejida impermeable al agua y permeable al aire, una capa de almohadilla súper absorbente, una capa no tejida y una capa de silicona como capa de contacto. La estructura multicapa facilita el manejo de fluido para proporcionar el ambiente de cura húmedo óptimo que promueve un cierre de la lesión más rápido. La almohadilla absorbente proporciona una absorción superior y bloquea el exudado. Esto minimiza el riesgo de maceración y de daños en la piel perilesional.

### Indicaciones:

Las indicaciones autorizadas para la utilización del apósito Súperabsorbente ConvaMax™ adhesivo con cargo a la financiación por el Sistema Nacional de Salud Español son las siguientes: Úlceras Vasculares y Úlceras por Presión con exudado de moderado a abundante.

### Instrucciones de uso:

1. Después de limpiar la lesión, seleccionar el tamaño del apósito permitiendo suficiente espacio entre el borde de la lesión.
2. El apósito Súperabsorbente ConvaMax™ adhesivo puede ser utilizado como apósito primario o secundario. Cuando se utiliza como primario, el apósito Súperabsorbente ConvaMax™ adhesivo debe estar en contacto íntimo con el lecho de la lesión para asegurar que el fluido se absorba. La capa de contacto blanca deberá estar en contacto con la piel y la capa azul impermeable deberá estar alejada del cuerpo.

3. El apósito Súperabsorbente ConvaMax™ adhesivo se adhiere por sí mismo, pero puede requerir fijación adicional con un apósito de fijación o con un vendaje de compresión de suave a moderado.
4. La frecuencia de cambio de apósitos depende de la cantidad de exudado.
5. La retirada del apósito se puede facilitar humedeciéndolo con solución salina.
6. Eliminar como un residuo normal. Si está contaminado, seguir las regulaciones locales.

### Contraindicaciones:

1. No utilizar este producto en lesiones secas o con bajo nivel de exudado, ojos, membranas mucosas o en lesiones cavitadas debido a que el apósito aumenta de tamaño con la absorción. No utilizar en quemaduras de tercer grado.
2. El apósito Súperabsorbente ConvaMax™ no debería ser utilizado en personas con alergia o hipersensibilidad conocida al apósito o sus componentes.
3. No utilizar en lesiones con sangrado arterial o lesiones muy sangrantes.

### Precaución:

1. No reutilizar. No utilice el apósito si el embalaje estéril está dañado o abierto.
2. No corte el apósito, la capa de cobertura debe permanecer intacta.

**Almacenaje:** Por favor, almacenar el producto en un lugar frío y seco evitando la luz.

**Caducidad:** 3 años desde la fecha de fabricación.

© 2024 ConvaTec Inc.  
®/™ indica marcas de ConvaTec Inc.



No reutilizar



Fecha de caducidad



Limite de temperatura



Número de lote



Fecha de fabricación



Precaución



Esterilizado utilizando óxido de etileno



No usar si el embalaje está dañado y consulte las instrucciones de uso



Fabricante



0123

Marcado CE con Identificación de Organismo Notificado



Representante Autorizado en la Comunidad Europea



Consulte las instrucciones de uso o las instrucciones de uso electrónicas



No contiene látex de caucho natural



Mantener seco



Mantenerse alejado de la luz solar



Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd  
North Shangxia Rd. Dongjiang Hi-tech Industry Park  
516005, Huizhou, P.R. China  
Tel: +86-752-5302188 Fax: +86-752-5302088



Shanghai International Holding Corp.  
GmbH (Europe) Eiffestrasse 80  
20537 Hamburg, Germany

Distributed by:

ConvaTec Limited

First Avenue, Deeside Industrial Park

Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

ConvaTec Inc.

Greensboro, NC 27409

USA

ConvaTec Inc. has granted a license to Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. to use the ConvaMax and ConvaTec trademarks.

Spain 936023700