


ESENTA™

Stomahesive®

Pasta / Πάστα

Barriera cutanea protettiva e riempitiva / Προστατευτικός
Φραγμός & Πλήρωσης Δέρματος
Istruzioni per l'uso / Οδηγίες χρήσης

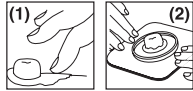

IT ITALIANO

Uso previsto: Proteggere la cute esposta tra la base dello stoma e l'apertura nella placca e fungere da riempitivo per pieghe e irregolarità cutanee.

Indicazioni per l'uso: Per uso con colostomia, ileostomia o urostomia.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La Pasta Stomahesive è una barriera cutanea altamente efficace per riempire e sigillare le irregolarità cutanee, specificamente studiata per essere applicata attorno alle colostomie, ileostomie ed urostomie.

CONTROINDICAZIONI

Non usare su pazienti con ipersensibilità accertata alla pasta o ai suoi componenti.

IMPORTANTE:

1. Solo per uso esterno. Non applicare su ferite aperte o su ulcere cutanee.
2. Contiene alcol.
3. In caso di irritazione, sospendere l'uso del prodotto e consultare un operatore sanitario.

MODALITA' D'USO

APPLICAZIONE SULLA PLACCA

- Preparare la placca come descritto nelle Istruzioni d'Uso contenute nella confezione della placca stessa.
- Applicare un anello di pasta sul retro della placca intorno al foro. Non stendere la pasta. Attendere un minuto prima di applicare la placca.
- Per un efficace utilizzo, schiacciare e appiattire il tubetto partendo dalla base.

APPLICAZIONE SULLA CUTE

Applicare la Pasta Stomahesive per riempire depressioni o superfici irregolari della cute. Se necessario usare un dito inumidito o una spatola per stendere la pasta in maniera uniforme. (1)

ISTRUZIONI PER L'USO

- Applicare la placca e premere con decisione intorno alla base dello stoma. (2)
- Una ulteriore quantità di Pasta può essere applicata in qualsiasi momento per migliorare ulteriormente la protezione

- della pelle attorno allo stoma.
- Assicurarsi che il tappo sia ben chiuso.

RIMOZIONE DELLA PASTA STOMAHESIVE

La Pasta Stomahesive può essere rimossa facilmente dopo 48 ore. Nel caso fosse necessario rimuovere la pasta prima, utilizzare acqua tiepida. Non è necessario rimuovere eventuali residui prima di procedere ad una nuova applicazione.

SMALTIMENTO

Se, durante l'uso di questo dispositivo o in conseguenza del suo utilizzo, si verificasse un inconveniente grave, segnalare la problematica al produttore e all'autorità nazionale competente. Maneggiare e smaltire il prodotto in conformità con le prassi mediche accettate e con tutte le leggi e le normative locali applicabili.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Convatec, ci può contattare all'indirizzo riportato di seguito:

© 2025 Convatec Inc.

®/™ sono marchi di proprietà di Convatec Inc.

EL ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Προβλεπόμενη χρήση: Προστατεύει το εκτεθειμένο δέρμα μεταξύ της βάσης της στομίας και του ανοίγματος στην Βάση σάκου και ως πληρωτικό υλικό για τις πτυχές του δέρματος και τις ανωμαλίες στην επιφάνεια του δέρματος.

Ενδείξεις Χρήσης: Για χρήση με κολοστομία, ειλεοστομία ή ουροστομία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Πάστα Stomahesive είναι ένα βολικό, εξαιρετικά αποτελεσματικό πληρωτικό, σφραγιστικό και προστατευτικός δερματικός φραγμός ειδικά σχεδιασμένη για χρήση γύρω από κολοστομία, ειλεοστομία ή ουροστομία.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ

Να μη χρησιμοποιείται σε άτομα με γνωστή ευαισθησία στην pasta ή στα συστατικά της.

ΣΜΑΝΤΙΚΟ:

1. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μην εφαρμόζετε σε ανοιχτό τραύμα ή έλκος δέρματος.
2. Περιέχει αλκοόλ.
3. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός, διακόψτε τη χρήση και απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία υγείας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ

- Προετοιμάστε την Βάση του σάκου όπως περιγράφεται στις Οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν την Βάση / Σάκο σας.
- Εφαρμόστε ένα δακτύλιο πάστας στο πίσω μέρος της Βάσης / Σάκου γύρω από την τρύπα. Μην απλώνετε την pasta. Περιμένετε ένα λεπτό πριν εφαρμόσετε την Βάση / Σάκο.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, πιέστε το σωληνάριο από κάτω και ισιώστε καθώς ανεβαίνετε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

Εφαρμόστε την Πάστα Stomahesive για να γεμίσετε κοιλότητες και ακανόνιστο περίγραμμα δέρματος. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο δάχτυλο ή σπάτουλα για να απλώσετε την pasta ομοιόμορφα. (1)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Εφαρμόστε την Βάση / Σάκο σας και πιέστε σταθερά προς τα κάτω γύρω από τη βάση της στομίας. (2)
- Επιπρόσθετη pasta μπορεί να εφαρμοστεί για περαιτέρω

προστασία του δέρματος γύρω από τη στομία ανά πάσα στιγμή.

- Σφίξτε καλά το καπάκι.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΤΑΣ STOMAHESIVE

Η Πάστα Stomahesive αφαιρείται εύκολα αφού παραμείνει στη θέση της για 48 ώρες. Εάν η pasta πρέπει να αφαιρεθεί νωρίτερα, χρησιμοποιήστε ζεστό νερό. Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε όλα τα ίχνη της πάστας πριν από μια νέα εφαρμογή.

ΔΙΑΘΕΣΗ

Εάν κατά τη χρήση αυτής της συσκευής ή ως αποτέλεσμα της χρήσης της έχει συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό, αναφέρετε το στον κατασκευαστή και στην εθνική σας αρχή. Χειριστείτε και απορρίψτε σύμφωνα με την αποδεκτή ιατρική πρακτική και τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Convatec, επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση.

© 2025 Convatec Inc.

®/™ Υποδεικνύει εμπορικό σήμα της Convatec Inc.



Dispositivo medico / Ιατροτεχνολογικό προϊόν



Consultare le istruzioni per l'uso o le istruzioni per l'uso elettroniche / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης ή συμβουλευτείτε τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης



Contiene materiale biologico di origine animale / Περιέχει βιολογικό υλικό ζωικής προέλευσης



Importatore / Εισαγωγέας

MODALITA' DI CONSERVAZIONE / ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ



Massima temperatura / Όρια θερμοκρασίας



Convatec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK



UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Østed
4320 LEJRE DENMARK

Italia 800 930 930

Revised 2025-04

www.convatec.com

1739991A1