



ESENTA™

バリケア® パウダー

使用説明書

㉠ 使用説明書

製品の概要

バリケア パウダーは、滲出物や排泄物から皮膚を保護する粉状皮膚保護剤です。ストーマやストーマ周囲皮膚と皮膚保護剤の間の小さなすきまを埋めるために使用します。

使用方法

皮膚保護剤を貼付した後、ストーマと皮膚保護剤の間に散布します。

使用上の注意

- 本品の材質が肌に合わないときは使用を控え、医師または看護師に相談して下さい。
- 使用後は必ずふたをしてください。

コンバテックでは、上記以外にもさまざまなオストミー製品をご用意しております。製品についての情報からストーマケアのご相談まで何でもお気軽にお問い合わせください。



ご使用の前にこの説明書をよくお読みください。



製造番号を示します。

輸入販売元

コンバテック ジャパン株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目1番7号

お客様相談窓口

0120-532384

www.convatec.com

© 2024 Convatec.
™/® はConvatec Inc.の登録商標です。

Issued: 2024-10
SI2456