

ESENTA™

バリケア® ペースト

練状皮膚保護剤 使用説明書

ja 日本語

製品の概要

バリケアペーストは、簡単かつ効果的にしわやくぼみの補正が出来、密着性を高めるための練状皮膚保護剤で、あらゆるタイプのストーマ周囲にご使用いただけます。また、ストーマの基部と皮膚保護剤のすきまを埋めるため、ストーマ周囲の皮膚に低い部分がある場合や傷跡やしわがある場合の補正にご使用ください。

使用上の注意

- 本品の材質が肌に合わないときは使用を控え、医師または看護師に相談して下さい。

重要

- 開放創や潰瘍部に直接使用しないでください。
- 本品はアルコールを含んでいます。
- もし本品による皮膚刺激が生じそれが継続する場合は、本品の使用を中止し、医師または看護師に相談して下さい。

使用方法

皮膚保護剤に塗る場合

- 各製品に添付されている使用説明書の貼付の準備に従って、皮膚保護剤に穴を開けてください。
- 剥離紙をはがし、皮膚保護剤の皮膚貼付側の穴の間隙に適量のペーストを塗布します。この際、ペーストを均さないでください。30秒から1分ほどペーストを乾かした後、皮膚保護剤を貼付してください。
- 使いきるためにうしろから絞して下さい。

皮膚に直接塗る場合

- 皮膚のしわやくぼみの部分にペーストを直接塗ります。必要に応じてぬらした指で、しわやくぼみが埋まり平坦になる程度にのばします。(図1)。



一般的な使用方法

- ストーマ周囲が確実に密着するように皮膚保護剤を貼付してください。(図2)
- フランジの貼付後、ストーマとフランジのすきまを埋めるために重ねて使用することもできます。
- 使用後は、必ず速やかにふたをしてください。

ペーストの除去

使用後2日経過すると、ペーストは簡単に除去できます。2日以内にはがすときは、微温湯で湿らすとはがしやすくなります。皮膚に残ったペーストは、無理にはがす必要はありません。

使用済チューブの処理

ゴミの分別は、各自治体の方針に従ってください。



(図1)



(図2)

コンバテックでは、上記以外にもさまざまなオストミー製品をご用意しております。製品についての情報からストーマケアのご相談まで何でもお気軽にお問い合わせください。



使用説明または電子版使用説明を参照してください

保存上の注意



室温で保存し、高温や直射日光を避けてください。



製造番号を示します。

輸入販売元

コンバテック ジャパン株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽1-1-7

お客様相談窓口

0120-532384

© 2025 ConvaTec Inc.

®/™ ConvaTec Inc.の商標であることを示します。

www.convatec.com

Issued: 2025-02

1739992