

SISTEMA 2[®] S

Little Ones[®]

Placca

Istruzioni per l'uso



Attenzione



Consultare il foglietto illustrativo

Per la raccolta degli effluenti stomali.


Uso previsto: Gestione delle emissioni dallo stoma.

Indicazioni per l'uso: Per uso con colostomia, ileostomia o urostomia.


ATTENZIONE: E' necessario prestare la massima attenzione quando si impiegano prodotti adesivi intorno ad uno stoma retratto, specialmente quando associato a megaureteri ed in assenza di un reservoir urinario. In alcuni rari casi è stata riscontrata la presenza di sostanze adesive nel sistema di raccolta renale di questi pazienti. In caso di riscontro di una massa nel tratto urinario, valutare se continuare ad usare il prodotto adesivo ed iniziare un adeguato trattamento clinico.

PREPARAZIONE DELLA PLACCA


La cute peristomale **deve** essere pulita, asciutta e priva di sostanze grasse o oleose.

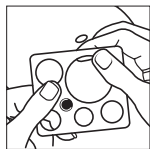

Scegliere una placca con flangia di diametro di almeno 10 mm superiore a quello dello stoma.

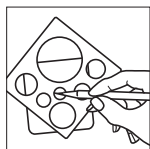

Tracciare con una matita i contorni esatti dello stoma sulla carta protettiva della placca.

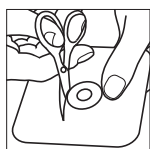



Ritagliare seguendo la linea disegnata e lasciando almeno 5 mm di barriera protettiva tra il foro allargato e la flangia. Rimuovere la carta protettiva.

PRECAUZIONI:

E' stato evidenziato che il collare adesivo in tessuto della placca ha causato irritazioni cutanee in alcuni utilizzatori, specialmente se indossavano il pannolino. E' possibile rimuovere il collare adesivo ritagliandolo con delicatezza dalla flangia. Questo metodo è raccomandato nel caso in cui l'irritazione cutanea si sviluppi al di sotto del collare adesivo.



Durante l'applicazione del sacchetto di raccolta è importante esercitare una pressione molto delicata sull'addome dell'infante. Per evitare un'eccessiva pressione, applicare il sacchetto alla placca prima del posizionamento sull'addome, oppure impiegare un sistema di raccolta ad un pezzo.

APPLICAZIONE DELLA PLACCA

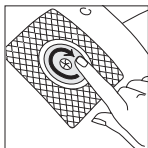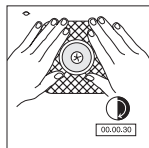


Assicurarsi che il sacchetto si ben posizionato intorno allo stoma.

APPLICAZIONE DEL SACCHETTO

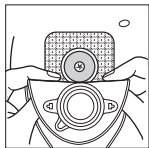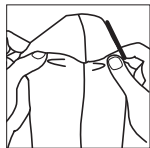


RIMOZIONE DEL SACCHETTO

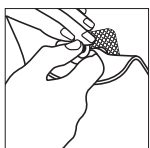


RIMOZIONE DELLA PLACCA




IMPIEGO DEL MORSETTO DI CHIUSURA

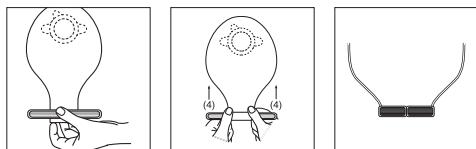

IMPIEGO DEL TUBICINO CON CHIUSURA A GOMITO

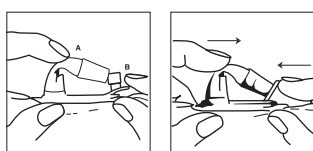

Per il collegamento con un raccoglitore da notte:

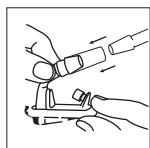

Non è necessario rimuovere il prodotto per fare il bagno o la doccia. Asciugare con delicatezza dopo l'esposizione all'acqua.


SMALTIMENTO

Il presente dispositivo è esclusivamente monouso e non deve essere riutilizzato. Il riutilizzo può comportare un aumento del rischio di infezioni o di contaminazione crociata. Il riutilizzo può rendere le proprietà fisiche del dispositivo non più ottimali per l'uso previsto.

Se, durante l'uso di questo dispositivo o in conseguenza del suo utilizzo, si verificasse un inconveniente grave, segnalare la problematica al produttore e all'autorità nazionale competente.

Dopo l'uso, il prodotto può rappresentare un potenziale rischio biologico. Maneggiare e smaltire il prodotto in conformità con le prassi mediche accettate e con tutte le leggi e le normative locali applicabili.

CRITERI DI CONSERVAZIONE

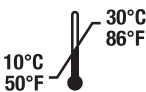

Monouso



Dispositivo medico





Importatore

Nota: In caso di irritazione, consultare un professionista sanitario.

Per ulteriori informazioni sui prodotti ConvaTec, rivolgersi all'indirizzo in calce.

Distribuito da:
ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
1-800-422-8811

 ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

 UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK

Italia 800 930 930

www.convatec.com

© 2021 ConvaTec Inc.

®/™ indica un marchio registrato di ConvaTec Inc.