

## ENTSORGUNG

Bitte beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Dieses Produkt ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt und darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung kann erhöhtes Infektionsrisiko oder Kreuzkontaminierung zur Folge haben. Die physischen Eigenschaften des Produkts sind dann möglicherweise nicht mehr optimal für den Verwendungszweck geeignet.

Falls während der Verwendung dieses Geräts bzw. aufgrund seiner Verwendung ein schwerer Vorfall aufgetreten ist, dies dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde melden.

Nach seiner Verwendung stellt dieses Produkt möglicherweise eine Biogefährdung dar. Es muss gemäß allgemein anerkannter medizinischer Praxis sowie anwendbaren lokalen Gesetzen und Vorschriften gehandhabt und entsorgt werden.

**MD** Medizinprodukt  Importeur **EC REP** Bevollmächtigter EU-Repräsentant

ConvaTec Inc.  
Greensboro, NC 27409  
USA  
1-800-422-8811

 ConvaTec Limited  
First Avenue, Deeside Industrial Park  
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

Sponsored in Australia by:  
ConvaTec (Australia) Pty Ltd.  
1800 339 412 Australia  
0800 441 763 New Zealand

**EC REP** UNOMEDICAL A/S  
 Aaholmvej 1-3, Østød  
4320 LEJRE DENMARK

輸入販売元  
コニハテック シェパソン株式会社  
お客様相談窓口  
☎ 0120-532384

ConvaTec Polska Sp. z o.o.  
Al. Armii Ludowej 26,  
00-609 Warszawa,  
Polska

Linus Medical UAB  
Ukmergės g. 223,  
LT-07156 Vilnius  
Lithuania

ConvaTec Turkey  
S. İkinur Keleş Sk. Hüseyin  
Bagdatlıoğlu Plz. No: 5/3  
Kozyatagı, Kadıköy, 34742  
İSTANBUL TURKEY

New Zealand  
0800-441-763  
Norge  
80030995  
Österreich  
0800-216339  
Polska  
0800 120 093  
Portugal  
800 20 1678  
România  
+40 21 230 23 90  
Singapore  
65-62459838  
Slovenia  
080 15 45  
Slovensko  
0 800 122 111  
South Africa  
+27 (0)861 888 842  
Srbija  
0800 101 102  
Suisse  
0800-551110  
Suomi  
0800 179 797  
Sverige  
08-704 72 50 / 020-21 22 22  
Thailand  
66-2-240600  
Türkiye  
0216 416 52 00  
United Kingdom  
0800 282 254 - Ostomy Care  
0800 289 738 - Wound Therapeutics  
400665576  
0800-886-989  
82-2-34536333  
☎ 0120-532384  
+7 800 200 80 99  
+380 44 451 85 51  
02/ 3 248 426 / 02/ 3 248 458  
0800 18 808

ConvaTec Česká republika s.o.  
Olivova 4/2096  
110 00 Praha 1

Linus Medical  
Duntes street 6-412,  
Riga, LV-1013  
Latvia

Verslum, s.o.o.  
Seberinih 2  
821 03 Bratislava  
Slovak Republic

Linus Medical  
Narva mnt 5,  
10117 Tallinn, Estonia

Импортер / Представитель в РФ:  
ЗАО «Конвэтек»,  
115054, Москва,  
Космодамианская наб., д.52, стр.1.  
Тел.: +7 (495) 663 70 30  
Факс: +7 (495) 748 78 94  
Информационная линия поддержки  
Конвэтек (звонок по России  
бесплатный): 800-200-80-99.  
Часы работы 9.00-17.00

Replant Cardio Kft.  
Nándorfejérvári u. 35,  
H-1119 Budapest  
Hungary

STOMA MEDICAL d.o.o.  
Frana Fohnegovića 1c  
10000 ZAGREB  
Phone: 00385 (0)1 5508 998  
Fax: 00385 (0)1 6177 217  
E-mail: rbezovic@stoma-medical.hr  
Web: www.stoma-medical.hr

PCP EOOD  
ул. „Виктор Григорович“ №3 ет1,  
София 1606  
En. nouaz: res@techno-link.com  
tel. (02) 851 90 70, 851 90 71  
факс: (02) 951 59 32  
Безплатна тел. линии: 0800 18 808

TT Medik  
Bulevar Mihajla Pupina 10 D/1  
11070 Novi Beograd  
Srbija

Rombiomedica S.R.L.  
Str. Nikolai Copci nr.1A,  
apart. 2, sector 1,  
011815 Bucharest  
Romania

Zastopnik in distributor v Sloveniji:  
VALEKIA Stoma-Medical d.o.o.  
Gregorčičeva 9  
1000 Ljubljana  
Slovenija  
Brezplačna tel. številka: 080 15 45

Australia  
1 800 339 412  
Belgie  
02 3899742 or 0800-12011  
Bosna  
080020208  
Canada  
1-800-465-6302  
Česká republika  
800122111  
Chile  
800-210-113  
Cna Gora  
0800 101 102  
Danmark  
48 167474  
Deutschland  
0800-78 66 200  
Eesti  
8003030  
Egypt  
(2012) 3645495 / (2012) 5557478  
España  
93 6023700  
France  
0800 35 84 80  
Hong Kong / 香港  
852-25169182  
Hrvatska  
01/5508 999 or 0800 8000  
Ireland  
1 800 721721  
Israel  
+ 972 3 9256712  
Italia  
800 930 930  
Kosovo  
044/ 116 722  
Latvija  
8000 5 333  
Lietuva  
8-800-70001  
Luxemburg  
+32 2 3899742 or 0800-23157  
Magyarország  
0680 201 201 (code: 1212)  
Malaysia  
1-800-880-601  
Niederland  
0800-0224444 - stomazorgroducten  
0800-0224460 - woundzorgproducten

0800-441-763  
80030995  
0800-216339  
0800 120 093  
800 20 1678  
+40 21 230 23 90  
65-62459838  
080 15 45  
0 800 122 111  
+27 (0)861 888 842  
0800 101 102  
0800-551110  
0800 179 797  
08-704 72 50 / 020-21 22 22  
66-2-240600  
0216 416 52 00  
0800 282 254 - Ostomy Care  
0800 289 738 - Wound Therapeutics  
400665576  
0800-886-989  
82-2-34536333  
☎ 0120-532384  
+7 800 200 80 99  
+380 44 451 85 51  
02/ 3 248 426 / 02/ 3 248 458  
0800 18 808

中国  
台湾 / 台湾  
한국  
日本  
Россия  
Україна  
Македонија  
България  
www.convatec.com



# Urihesive® strips

 Anwendungshinweise

 ConvaTec

# Anwendungshinweise





URIHESIVE® ist ein Adhäsivstreifen, der auf beiden Seiten haftet und so eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Kondom-Urinal und dem Penischaft gewährleistet. URIHESIVE® besteht aus Pektin, Gelatine, Natrium-Carboxymethylzellulose und Polyisobutylen und ist deshalb außerordentlich hautfreundlich. Unverträglichkeiten oder Hautreizungen sind von URIHESIVE® nicht bekannt geworden.

## Zur Beachtung

1. Vermeiden Sie, die URIHESIVE®-Haftfläche mit den Händen zu berühren.
2. Bringen Sie URIHESIVE® etwas unterhalb der Peniswurzel an.
3. Damit keine Haare zwischen Haut und URIHESIVE® kommen, ist es zweckmäßig, diesen Bereich zu rasieren.

## Gebrauchsanweisung

1. Entfernen Sie das Schutzpapier auf einer Seite des Adhäsivstreifens.

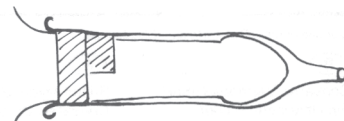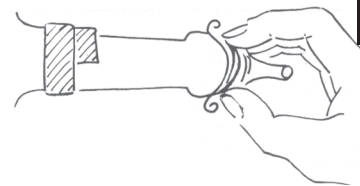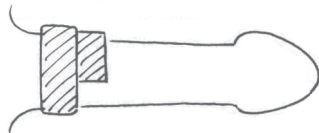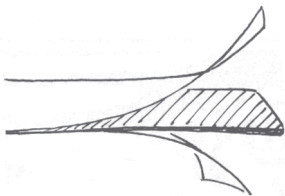

2. Bringen Sie den Adhäsivstreifen spiralförmig an und entfernen Sie dabei das Schutzpapier der anderen Seite.
3. Rollen Sie den Kondom-Urinal über den URIHESIVE®-Adhäsivstreifen hinweg.
4. Sorgen Sie dafür, daß der Kondom-Urinal richtig auf dem URIHESIVE®-Adhäsivstreifen klebt.

**Wichtig:** Der URIHESIVE®-Adhäsivstreifen darf nicht zu eng angebracht werden, damit die normale Blutzufuhr nicht unterbrochen wird.

Nach etwa 15 Minuten sollten Sie überprüfen, ob keine Schwellung erfolgt ist.

5. Das Entfernen des Kondom-Urinals erfolgt durch einfaches Zurückrollen.
6. Aus hygienischen Gründen empfiehlt es sich, URIHESIVE®-strips täglich zu wechseln.

**Bei Zimmertemperatur lagern!  
Vor Frost und Feuchtigkeit schützen!**

**Handelsform**  
15 Adhäsivstreifen  
120mm x 15mm