

Ileodress® MINI

Endels tömbar påse med hudskydd


Bruksanvisning




Svenska – Bruksanvisning

Ileodress Mini är ett endels stomibandage med hudskydd av det oöverträffade Stomahesive®-materialet. Påsen är tillverkad av luktät plast och försedd med luftig baksida som enkelt kan torkas av efter bad/dusch.


WARNING! Var försiktig vid användning av självhäftande produkter runt en urostomi i hudnivå, speciellt i samband med megauretärer och vid avsaknad av urinreservoar. I sällsynta fall har kliniska rapporter dokumenterat närvaron av häftmaterial i det renala uppsamlingsystemet hos dessa patienter. Om så skulle vara fallet bör fortsatt användning av självhäftande produkter övervägas och lämplig klinisk behandling inledas.

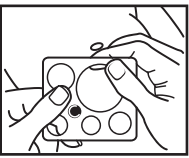

1. Mät stomins diameter och klipp till en pappershålmall som passar stomin. Markera stomidiametern på skyddspapperet på bandagets baksida.

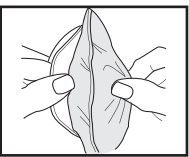

2. Sära påsens insidor eller blås luft i påsen innan tillklippningen.

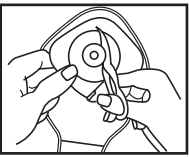


3. Klipp ett hål för stomin i Stomahesive-materialet. Använd en sax med böjda skär.


TILLSLUTNING AV PÅSLÅS

OBS! Det är viktigt tillsluta påsen enligt **beskrivningen** så att läckage ej uppstår.


Sätt fast påslåset innan påsen appliceras på kroppen.

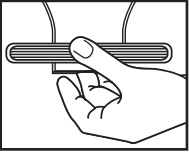

4. Avlägsna skyddspapperet från den självhäftande remsan på påslåset. Sätt låset ca 1/2 cm från påsens öppning på den sida som ej har hudskydd. Tryck fast.

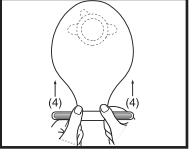


5. Rulla från påsens öppning hårt **4 gånger** som på bilden.

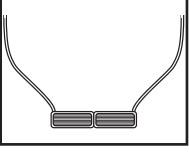


6. Vik påslåsets ändrar mot påsens sida med hudskydd som visas på bilden och se till att den är slät, platt och utan veck.


APPLIKATION AV PÅSEN

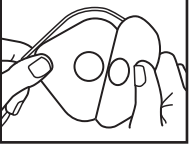

7. Avlägsna skyddspapperet och undvik att ta med fingarna på häften. OBS! När Stomahesive pasta används bör den appliceras som en ring runt det uppklippta hålet.

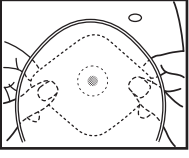


8. Håll i båda sidorna av hudskyddet och rikta hålet över stomin.

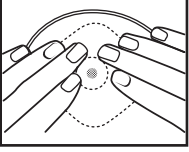

9. Värm försiktigt fast påsen på huden med händerna och var speciellt noga med området närmast stomin.

Ileodress Mini-påsen kan sitta kvar så länge det känns bekvämt och det inte finns några tecken på irritation.

BORTTAGANDE AV PÅSEN

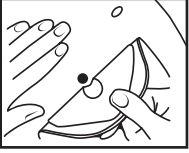

10. Avlägsna påsen uppifrån och ner genom att försiktigt dra bort hudskyddet från huden medan man trycker lätt på huden intill med den fria handen.

FÖRVARING

Förvaras i rumstemperatur. Undvik kyla och hog luftfuktighet. Engångsprodukt.

Denna produkt är endast avsedd för engångsbruk och får inte återanvändas. Återanvändning kan ge upphov till en ökad risk för infektion eller korskontaminering. Återanvändning kan leda till att produktens fysikaliska egenskaper inte längre är optimala för den avsedda användningen.

Efter användningen kan produkten vara en potentiell biologisk risk. Hantera och kassera den i enlighet med vedertagen medicinsk praxis och gällande lokala lagar och bestämmelser.

Om det under användningen av den här enheten eller som ett resultat av dess användning inträffar en allvarlig incident ska den rapporteras till tillverkaren och till din nationella tillsynsmyndighet.

KVITTBILVNING AV ANVÄNDA PÅSAR

Efter användning skall påsen tömmas i toaletten och därefter omsorgsfullt paketeras och slängas med hushållsavfallet. Spola aldrig ner stomimaterial i toaletten!

Om du är intresserad av att komma i kontakt med andra stomiopererade kan du göra detta genom föreningen ILCO Svenskt Förbund för Stomiopererade.

Ileodress® MINI

Yksiosainen tyhjennettävä pussi kiinnityslevyllä

Käyttöohje




Suomi – Käyttöohje


Ileodress Mini on yksiosainen, tyhjennettävä avannesidos, jossa on Stomahesive®-massaa ihon suojana ja tiivisteenä.

Pussi on valmistettu hajunpitävästä muovista, ja sen takaosa on ilmavaa, suihkun/kylvyn jälkeen helposti kuivattavaa materiaalia.


VAROITUS: Ole varovainen, kun käytät itsekiinnittyviä tuotteita ihon tasolla olevassa virtsa-avanteessa, varsinkin megaureterin yhteydessä ja virtsasäiliön puuttuessa. Joskus on raportoitu kiinnitysvistä materiaaleista tällaisten potilaiden renaalisten keräysjärjestelmien yhteydessä.

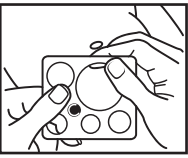

1. Mittaa avanteen läpimitta ja leikkaa sen kokoinen ja muotoinen aukko mallikorttiin. Piirrä avanteen malli kiini tysicslevyn suojapaperille.

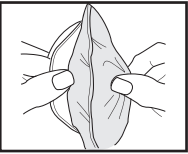

2. Erotta pussin seinämät toisistaan käsin tai puhaltamalla ilmaa pussiin.

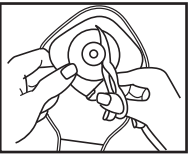


3. Suurena Stomahesive-levyn aukko avanteesi kokoiseksi esim. Käyrillä saksilla.


PUSSIN SULKEMINEN

HUOM! Pussi on suljettava ohjeen mukaan vuodon välttämiseksi.


Kiinnitä pussinsulkija ennen kuin kiinnität pussin.

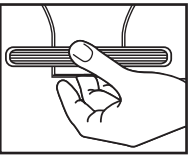

4. Poista suojapaperi pussinsulkijan kiinnitysvältä osalta. Kiinnitä sulkija huolellisesti noin 1/2 cm:n päähän tyhjennysaukosta sille puolelle pussia, jossa ei ole ihonsuojalevyä.

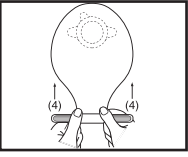


5. Kierrä pussia neljä (4) kertaa sulkijan ympäri kuvan osoittamalla tavalla.

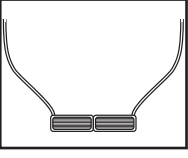


6. Taita sulkijan päät kuvan osoittamalla tavalla sille puolelle pussia, jossa on ihonsuoja. Pussiin ei saa tulla poimuja.


PUSSIN KIINNITTÄMINEN

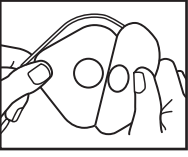

7. Poista suojapaperi ja vältä koskettelemasta kiinnityspintaa. HUOM. Stomahesive-pasta lisätään tarvittaessa renkaaksi aukon ympärille.

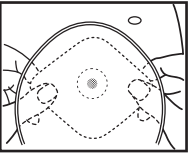


8. Pidä kiinni ihonsuojalevyn molemmista sivuista ja kiinnitä sidos.

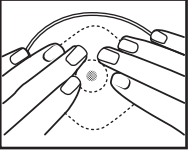

9. Kiinnitä pussi huolellisesti lämmittämällä Stomahesive-massaa sormin. Ole tarkka lähinnä avannetta olevan osan kiinnittämisessä.

Ileodress Mini-pussi voi alla paikallaan niin kauan kuin se tuntuu miellyttävältä, eikä ihoärsytyksen merkkejä ole havaittavissa.

PUSSIN POISTAMINEN

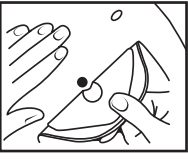

10. Irrota pussi varovasti ylhäältä alaspäin, paina kevyesti avannetta ympäröivää ihoa toisella kädellä.

SÄILYTYS

Säilytetään huoneenlämmössä, ei saa säilyttää kylmässä eikä kosteassa tilassa. Kertakäyttöinen.

Laite on kertakäyttöinen, eikä sitä saa käyttää uudelleen. Uudelleenkäyttö saattaa johtaa lisääntyneeseen infektion tai ristikontaminaation vaaraan. Laitteen ominaisuudet eivät ehkä enää ole optimaaliset tarkoitettua käyttöä varten.

Käytön jälkeen tämä tuote saattaa olla biologisesti vaarallista jätettä. Käsittele ja hävitä hyväksytyjen lääketieteellisten käytänteiden sekä soveltuvien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Jos laitteen käytön aikana tai seurauksena tapahtuu vakava tapaus, ilmoita siitä valmistajalle ja kansalliselle vastaavalle viranomaiselle.

KÄYTETTYJEN PUSSIEN HÄVITTÄMINEN

Pussi tyhjennetään käytön jälkeen WC-pönttöön ja hävitetään muiden talousjätteiden mukana

Avanneleikattujen potilasyhdistyksen osoite Suomessa on

