

Stomahesive® Flexible con aro

apósitos flexibles autoadhesivos con aro de conexión

USO PREVISTO: Manejo de las excreciones del estoma.

INDICACIONES DE USO: Para usar con una colostomía, ileostomía o urostomía.

STOMAHESIVE FLEXIBLE CON ARO es un apósito que presenta un aro acoplable a las bolsas con aro de los sistemas COLODRESS Flexible, MINI COLODRESS Flexible, ILEODRESS Flexible, URODRESS Flexible, obtenéndose así un sistema colector de extraordinaria eficacia en ostomizados.

STOMAHESIVE FLEXIBLE CON ARO es un apósito autoadhesivo protector de las regiones cutáneas periestomales y perifistulares que lleva en su cara superior un aro de conexión acoplable al aro de la bolsa colectora.

La utilización de STOMAHESIVE FLEXIBLE CON ARO ofrece entre otras, las siguientes ventajas:


- Se evitan las maceraciones y escoriaciones de la región cutánea periestomal.
- Se mantiene la piel siempre seca y libre de irritación.
- No es necesario cambiar el apósito durante varios días.
- El soporte autoadhesivo flexible, proporciona una mayor adaptabilidad a la superficie de la piel, cualquiera que sea su configuración, lo que se traduce en un mayor confort.

- Derivadas del sistema de acoplamiento de los aros de doble encaje:
- Maxima seguridad de cierre apósito-bolsa.
- Garantía de la fijación gracias a que al realizarse el acoplamiento se produce un sonido perfectamente audible.
- Discreción y comodidad, puesto que el aumento de seguridad no supone aumento de volumen y/o número de piezas.
- Facilidad de uso, por los sencillos mecanismos de acoplamiento y retirada.

Elección del diámetro del aro


Se presentan cinco diámetros de aros de conexión: 32 mm, 38 mm, 45 mm, 57 mm y 70 mm.

Deberá elegirse el diámetro inmediatamente superior al diámetro del estoma.

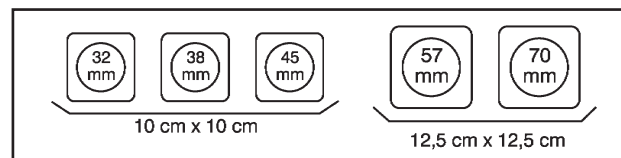


Como se prepara para su aplicación el apósito Stomahesive Flexible con aro

1. Mida el diámetro del estoma con la guía incluida y dibuje en el papel protector del disco **Stomahesive Flexible** su forma exacta.

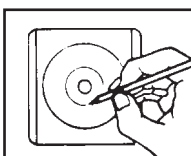


2. Agrade el agujero central hasta el diámetro correcto requerido, con unas tijeras curvadas.

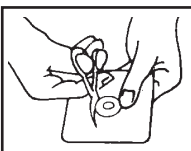

3. Retire el papel protector del disco Stomahesive flexible y seguidamente el del soporte flexible.

Modo de aplicación del apósito

4. Sujete el apósito por los laterales y aplique el disco **Stomahesive Flexible** previamente recordado alrede dor del estoma. Presione el disco sobre la piel, prestando especial cuidado a la zona situada entre su estoma y el aro.

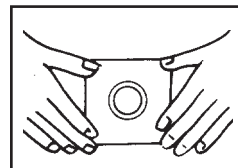


5. Aplique el soporte adhesivo sobre la piel alisándolo con las yemas de los dedos, desde el centro al exterior para evitar la formación de pliegues.


6. El apósito **Stomahesive Flexible** puede permanecer aplicado mientras mantenga su adherencia a la piel (hasta 7 días).

Como se acopla la bolsa al Stomahesive Flexible con aro

7. Acople la parte inferior del aro de la bolsa al del **Stomahesive Flexible con aro**. Cerciórese que las caras internas de la bolsa estén se paradas y que ésta contenga aire antes de ajustarla al **Stomahesive Flexible con aro**.

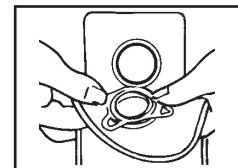


8. Partiendo de la parte inferior del aro, presione con suavidad a lo largo de la circunferencia hasta que la bolsa quede bien sujeta. Notará un pequeño "clic" que le indicará que la bolsa está bien acoplada. Para mayor seguridad tire suavemente de la bolsa hacia abajo, para confirmar la hermeticidad del cierre.

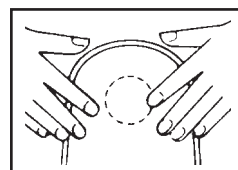


En caso de utilizar cinturón

9. Enganche los extremos de éste a las aletas de que va provisto el aro de la bolsa y ajústelo a su medida.

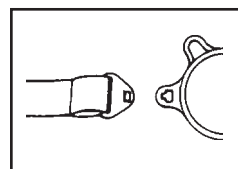


Para retirar la bolsa

10. La bolsa se separa con facilidad del **Stomahesive Flexible con aro** tirando de la pestaña que tiene el aro de la bolsa. La bolsa puede cambiarse cuantas veces se estime conveniente sin necesidad de retirar el **Stomahesive Flexible con aro**, mientras éste siga aportando comodidad y seguridad al paciente. Si los gases acumulados en la bolsa le resultan un problema bastará desconectarla un instante para darles salida.

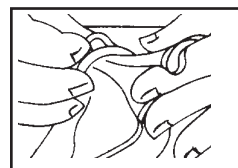


Inspección del estoma

11. Presionar suavemente la pestaña del aro de la bolsa para sacar ésta, lo que permite el fácil acceso al estoma, y al mismo tiempo no lesiona la piel ni las suturas. El abdomen puede estar flácido en los días del post-operatorio. Para reducir las molestias cuando se cambian las bolsas, presionar en una sola dirección. Enganche los extremos de éste a las aletas de que va provisto el aro de la bolsa y ajústelo a su medida.

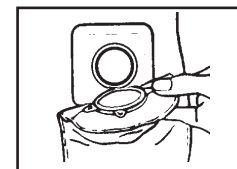

Recomendaciones para el cuidado de la piel

1. La limpieza de la piel debe hacerse con agua y jabón secándose a continuación.
2. Evite el uso de cremas o pomadas, ya que estas sustancias impedirán la perfecta adhesión del **Stomahesive Flexible con aro** a la piel.
3. Antes de aplicar un nuevo **Stomahesive Flexible con aro**, es conveniente limpiar la piel periestomal, para eliminar los residuos que pudieran quedar del anterior.
4. Para evitar escapes es conveniente ofrecer siempre al apósito **Stomahesive Flexible con aro** una superficie plana de adherencia. Cuando la piel que circunda al estoma no sea completamente lisa, será necesario rellenar las grietas con el producto **Stomahesive Pasta**.
5. Si quedan zonas de piel periestomal expuestas al contacto directo con las heces, se recomienda también utilizar **Stomahesive Pasta** para mayor protección.

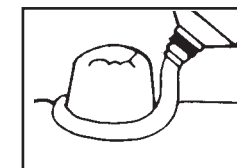

Eliminación del producto

Las bolsas deben vaciarse antes de su eliminación. Tanto bolsas como apósitos, no deben echarse al inodoro, dado que este procedimiento podría causar un atasco en el sistema de desagüe.

Este producto es para un solo uso y no debe reutilizarse. Su reutilización puede aumentar el riesgo de infección o contaminación cruzada. Las propiedades físicas del producto podrían ya no ser óptimas para el uso previsto.

Si sucede algún incidente grave mientras se usa este producto o tras su uso, comuníquelo al fabricante y a la autoridad nacional pertinente.

Tras su uso, este producto puede suponer un riesgo biológico. Utilícelo y deséchelo de acuerdo con las prácticas médicas aceptadas y la legislación y los reglamentos locales.

Precaución

Se debe tener cuidado cuando se usen productos adhesivos alrededor de una urostomía al ras, especialmente cuando se asocia con megauréteres y ausencia de un depósito urinario. En raras ocasiones, los informes clínicos han documentado la presencia del agente adhesivo en el sistema de recolección renal de estos pacientes. En caso de descubrirse una masa en el tracto urinario, se debe evaluar la continuación del uso del producto adhesivo e iniciar el tratamiento clínico apropiado.

La piel periestomal debe estar limpia, seca y libre de disolventes y sustancias grasas.

PRESENTACIONES			
ESPECIFICACIONES PARA SU PRESCRIPCION	ARO DE CONEXION	CONTENIDO	CODIGO NACIONAL
Stomahesive Flexible 32 mm - 10 cm x 10 cm	32 mm	5 apósitos	457085
Stomahesive Flexible 38 mm - 10 cm x 10 cm	38 mm	5 apósitos	457093
Stomahesive Flexible 45 mm - 10 cm x 10 cm	45 mm	5 apósitos	457101
Stomahesive Flexible 57 mm - 12,5 cm x 12,5 cm	57 mm	5 apósitos	457119
Stomahesive Flexible 70 mm - 12,5 cm x 12,5 cm	70 mm	5 apósitos	457127
STOMAHESIVE pasta	60 gramos		456798



No reutilizar



Consulte las instrucciones de uso



Precaución



Mantener seco



Límite de temperatura



Producto sanitario




Importador

Distribuido por:



ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
1-800-422-8811

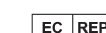

UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK



ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

España 93 6023700

© 2021 ConvaTec Inc.
®/™ indicates a trademark of ConvaTec Inc.

Instrucciones de uso

ES ESPAÑOL



Stomahesive® con aro

apósitos autoadhesivos
con aro de conexión

Uso previsto. Manejo de las excreciones del estoma.
Indicaciones de uso. Para usar con una colostomía, ileostomía o urostomía.

STOMAHESIVE CON ARO es un apósito que presenta un aro acoplable a las bolsas con aro de los sistemas COLODRESS, MINI COLODRESS, ILEODRESS, URODRESS, obteniéndose así un sistema colector de extraordinaria eficacia en ostomizados.

STOMAHESIVE CON ARO es un apósito autoadhesivo protector de las regiones cutáneas periestomales y perifistulares que lleva en su cara superior un aro de conexión acoplable al aro de la bolsa colectora.


La utilización de STOMAHESIVE CON ARO ofrece entre otras, las siguientes ventajas:

- Se evitan las maceraciones y escoriaciones de la región cutánea periestomal.
- Se mantiene la piel siempre seca y libre de irritación.
- No es necesario cambiar el apósito durante varios días.
- Derivadas del sistema de acoplamiento de los aros de doble encaje: Máxima seguridad de cierre apósito-bolsa. Garantía de fijación gracias a que al realizarse el acoplamiento se produce un sonido perfectamente audible. Discreción y comodidad, puesto que el aumento de seguridad no supone aumento de volumen y/o número de piezas. Facilidad de uso, por los sencillos mecanismos de acoplamiento y retirada.

Elección del diámetro del aro


Se presentan cinco diámetros de aros de conexión :
32 mm, 38 mm, 45 mm, 57 mm y 70 mm.

Deberá elegirse el diámetro inmediatamente superior al diámetro del estoma.

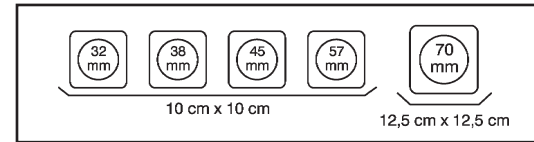


Como se prepara para su aplicación Stomahesive con aro


1. Se separa de la Guía de Medidas, que se adjunta, un círculo del mismo diámetro que el del estoma. Debe asegurarse que este diámetro se ajuste al del estoma, para que la piel periestomal quede protegida.

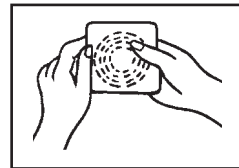

2. Con la Guía de Medidas preparada como patrón según la instrucción del punto 1, se marca una circunferencia sobre la cara posterior del **Stomahesive con aro** (recubierta con papel siliconado desechable).

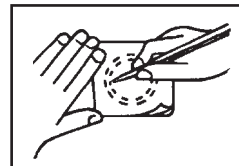


3. Recortar el orificio central anteriormente marcado en el **Stomahesive con aro**.

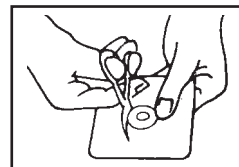


Modo de aplicación


4. Se limpia la piel periestomal con agua y jabón, secándose a continuación. Luego se despegue el papel siliconado protector que recubre la cara posterior del **Stomahesive con aro**.

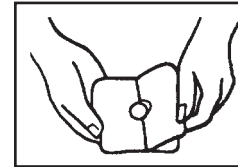

5. Se aplica el **Stomahesive con aro**, sobre la piel asegurándose que éste quede bien ajustado al estoma. Para ello, presionar suavemente con el dedo en movimientos circulares la parte del apósito alrededor del estoma.

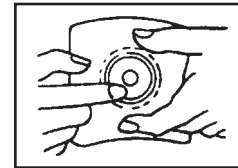


6. Una vez fijada la zona próxima al estoma adherir el resto del apósito sobre la piel, adaptándolo bien a la forma y perfil del abdomen. El **Stomahesive con aro** puede permanecer adherido tanto tiempo como provea el usuario de seguridad y comodidad.

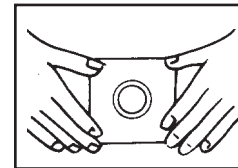


Como se acopla la bolsa al Stomahesive con aro

7. Acople la parte inferior del aro de la bolsa al del **Stomahesive con aro**. Cerciórese que las caras internas de la bolsa estén separadas y que ésta contenga aire antes de ajustarla al **Stomahesive con aro**.

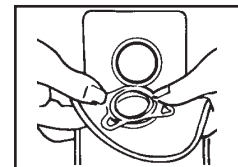


8. Partiendo de la parte inferior del aro, presione con suavidad a lo largo de la circunferencia hasta que la bolsa quede bien sujeta. Notará un pequeño "clic" que le indicará que la bolsa está bien acoplada. Para mayor seguridad tire suavemente de la bolsa hacia abajo, para confirmar la hermeticidad del cierre.

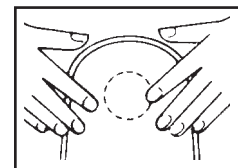


En caso de utilizar cinturón

1. Enganche los extremos de éste a las aletas de que va provisto el aro de la bolsa y ajústelo a su medida.

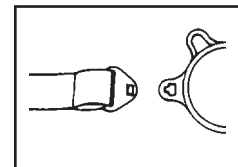

Para retirar la bolsa

10. La bolsa se separa con facilidad del **Stomahesive con aro** tirando de la pestaña que tiene el aro de la bolsa. La bolsa puede cambiarse cuantas veces se estime conveniente sin necesidad de retirar el Stomahesive con aro, mientras éste siga aportando comodidad y seguridad al paciente. Si los gases acumulados en la bolsa le resultan un problema bastará desconectarla un instante para darles salida.

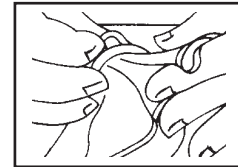


Recomendaciones para el cuidado de la piel

1. La limpieza de la piel debe hacerse con agua y jabón secándose a continuación.
2. Evite el uso de cremas o pomadas, ya que estas sustancias impedirán la perfecta adhesión del **Stomahesive con aro** a la piel.
3. Antes de aplicar un nuevo **Stomahesive con aro**, es conveniente limpiar la piel periestomal, para eliminar los residuos que pudieran quedar del anterior.

4. Para evitar escapes, es conveniente ofrecer siempre al apósito **Stomahesive con aro** una superficie plana de adherencia. Cuando la piel que circunda al estoma no sea completamente lisa, será necesario rellenar las grietas con el producto **Stomahesive Pasta**.

5. Si quedan zonas de piel periestomal expuestas al contacto directo con las heces, se recomienda también utilizar Stomahesive Pasta para mayor protección.

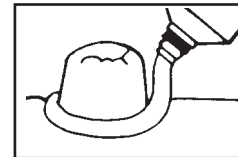

Eliminación del producto

Las bolsas deben vaciarse antes de su eliminación. Tanto bolsas como apósitos, no deben echarse al inodoro, dado que este procedimiento podría causar un atasco en el sistema de desagüe.

Este producto es para un solo uso y no debe reutilizarse. Su reutilización puede aumentar el riesgo de infección o contaminación cruzada. Las propiedades físicas del producto podrían ya no ser óptimas para el uso previsto.

Si sucede algún incidente grave mientras se usa este producto o tras su uso, comuníquelo al fabricante y a la autoridad nacional pertinente.

Tras su uso, este producto puede suponer un riesgo biológico. Utilícelo y deséchelo de acuerdo con las prácticas médicas aceptadas y la legislación y los reglamentos locales.

Precaución

Se debe tener cuidado cuando se usen productos adhesivos alrededor de una urostomía al ras, especialmente cuando se asocia con megauréteres y ausencia de un depósito urinario. En raras ocasiones, los informes clínicos han documentado la presencia del agente adhesivo en el sistema de recolección renal de estos pacientes. En caso de descubrirse una masa en el tracto urinario, se debe evaluar la continuación del uso del producto adhesivo e iniciar el tratamiento clínico apropiado.

La piel periestomal debe estar limpia, seca y libre de disolventes y sustancias grasas.

PRESENTACIONES

ESPECIFICACIONES PARA SU PRESCRIPCION	ARO DE CONEXION	CONTENIDO	CODIGO NACIONAL
Stomahesive con aro 32 mm -10 cm x 10 cm	32 mm	5 apósitos	431759
Stomahesive con aro 38 mm -10 cm x 10 cm	38 mm	5 apósitos	431767
Stomahesive con aro 45 mm -10 cm x 10 cm	45 mm	5 apósitos	431775
Stomahesive con aro 57 mm -10 cm x 10 cm	57 mm	5 apósitos	431783
Stomahesive con aro 70 mm -12,5 cm x 12,5 cm	70 mm	5 apósitos	431809
STOMAHESIVE pasta		60 gramos	456798



No reutilizar



Consulte las instrucciones de uso



Precaución



Mantener seco



Límite de temperatura



Producto sanitario



Importador

Distribuido por:

 **ConvaTec**

ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
1-800-422-8811



UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK



ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

España 93 6023700

© 2021 ConvaTec Inc.
®/™ indicates a trademark of ConvaTec Inc.

Revised 2021-08
1156927V1

Instrucciones de uso

es ESPAÑOL

