


URODRESS®

Sacchetti per urostomia ad un pezzo con barriera Stomahesive® a protezione cutanea totale.

ISTRUZIONI PER L'USO



MD Dispositivo medico  Importatore

BIO Contiene materiale biologico di origine animale

ConvaTec

URODRESS®

Sacchetti per urostomia ad un pezzo con barriera Stomahesive a protezione cutanea totale.

I sacchetti per urostomia Urodress sono dei dispositivi di raccolta ad un pezzo; la parte adesiva è costituita da una barriera protettiva della pelle (Stomahesive).

Realizzati specificatamente per gli stomizzati che hanno bisogno della protezione cutanea dello Stomahesive ma che preferiscono dispositivi ad un pezzo, questi sacchetti offrono i seguenti vantaggi:

- La protezione cutanea è assicurata dallo Stomahesive, che negli anni ha dimostrato di essere la più efficace e sicura barriera protettiva.
- Il sacchetto è costituito da un materiale antifruscio assolutamente impermeabile agli odori.
- Il sacchetto è dotato di una efficace valvola antiriflusso che evita il continuo contatto dell'urina con lo stoma.
- Il sacchetto è disponibile con barriera protettiva con fori pretagliati che ne facilitano l'applicazione o con barriera di tipo "universale" con foro iniziale di 19 mm da allargare in rapporto al diametro e forma dello stoma.
- Se si vuole una maggiore sicurezza nella tenuta del dispositivo di raccolta, è possibile utilizzare una cintura.

ATTENZIONE: E' necessario prestare la massima attenzione quando si impiegano prodotti adesivi intorno ad uno stoma retratto, specialmente quando associato a megaureteri ed in assenza di un reservoir urinario. In alcuni rari casi è stata riscontrata la presenza di sostanze adesive nel sistema di raccolta renale di questi pazienti. In caso di riscontro di una massa nel tratto urinario, valutare se continuare ad usare il prodotto adesivo ed iniziare un adeguato trattamento clinico.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Pulire la zona interessata con acqua tiepida e sapone (non usare alcool o etere) e asciugare delicatamente.
- Assicursi che la cute peristomale sia pulita, asciutta e priva di sostanze grasse che possano ridurre l'adesività.
- In presenza di pieghe o irregolarità nella superficie cutanea è consigliabile livellare le stesse con Stomahesive pasta per assicurare una perfetta adesione del sacchetto e garantire una assoluta impermeabilità agli odori. La pasta Stomahesive dovrebbe inoltre essere applicata sulla cute per proteggere la zona tra la base dello stoma ed il bordo della barriera protettiva.
- Durante il bagno o la doccia non è necessario rimuovere il dispositivo Urodress.
- Quando si sostituisce il sacchetto non è necessario rimuovere dalla cute eventuali residui.

CONFEZIONI DISPONIBILI

I sacchetti per urostomia Urodress sono disponibili nelle seguenti misure:

- Con barriera di tipo "universale" che permette di allargare il foro centrale in rapporto alle dimensioni e forma dello stoma da un diametro iniziale di 19 mm fino ad un massimo di 45 mm. Questo tipo di sacchetto offre quindi la possibilità di proteggere perfettamente la cute nella zona peristomale.
- Con barriera protettiva con fori pretagliati dei seguenti diametri: 25 mm – 32 mm – 38 mm – 45 mm.

PREPARAZIONE DEI SACCHETTI URODRESS PER L'APPLICAZIONE


Sacchetti con misure pretagliate

- Misurare il diametro dello stoma e scegliere il sacchetto che ha il foro pretagliato con un diametro uguale o leggermente superiore a quello dello stoma.




- 1) Per assicurare una perfetta protezione della zona peristomale e per evitare possibili infiltrazioni delle deiezioni sotto la barriera è consigliabile applicare intorno alla base dello stoma la pasta Stomahesive prima di far aderire il sacchetto.


Sacchetti con barriera di tipo “universale” (con foro da allargare)

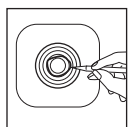

2) Misurare con il foglio guida accluso alla confezione il diametro dello stoma e con una matita riportare lo stesso sul foglio di carta che protegge la barriera Stomahesive.

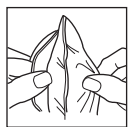


3) Prima di allargare il foro centrale, assicurarsi che le pareti del sacchetto siano staccate per evitare di tagliare accidentalmente il lato anteriore.

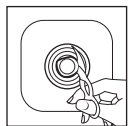

4) Seguendo la linea disegnata precedentemente, allargare il foro con una forbice a punta ricurva in modo che la barriera protettiva si adatti perfettamente allo stoma.
Non tagliare oltre l'ultima linea.


APPLICAZIONE DEI SACCHETTI URODRESS SIA CON FORI PRETAGLIATI CHE CON FORO DA ALLARGARE

- Asportare la plastica protettiva trasparente ed il foglio di carta siliconata della barriera Stomahesive.
- Tenendo il sacchetto dai lati applicare la barriera protettiva nella zona peristomale.
- Esercitare una leggera pressione, facendo particolare attenzione all'area peristomale, per favorire l'adesione della barriera Stomahesive.

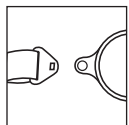

5) In caso ne sia indicato l'uso per una maggiore sicurezza, applicare la cintura fissandola agli appositi ganci, quindi adattarla alla circonferenza corporea.


CHIUSURA DEL TUBICINO DI SCARICO DEI SACCHETTI PER UROSTOMIA

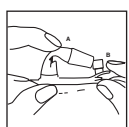

6) Per chiudere il tubicino di scarico (A) piegare lo stesso per poter inserire il tappo (B).



7) Esercitare sul tappo una pressione sufficiente ad ottenere la perfetta chiusura del tubicino.

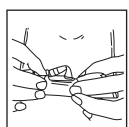

8) Per togliere il tappo esercitare con le dita una lieve pressione sul tubicino nella zona che segue l'estremità del tappo.

N.B. Alla confezione dei sacchetti è accluso un raccordo che consente di poter collegare, nelle ore notturne, il tubicino di scarico del sacchetto ad una sacca da notte, di maggiore capacità.

RIMOZIONE DEL DISPOSITIVO



Dopo aver svuotato il sacchetto rimuovere il dispositivo staccandolo delicatamente dall'alto verso il basso o da un lato, e contemporaneamente esercitare una leggera pressione sulla cute con la mano libera.

CONFEZIONI DISPONIBILI

Urodress

Scatola da 10 sacchetti	codice
Foro da allargare (19-45 mm)	9207
Diametro pretagliato - 25 mm	9208
Diametro pretagliato - 32 mm	9209
Diametro pretagliato - 38 mm	9210
Diametro pretagliato - 45 mm	9211
<hr/>	
Sono inoltre disponibili:	codice
Stomahesive Pasta protettiva	7598
Stomahesive Polvere protettiva	7595

Il presente dispositivo è esclusivamente monouso e non deve essere riutilizzato. Il riutilizzo può comportare un aumento del rischio di infezioni o di contaminazione crociata. Il riutilizzo può rendere le proprietà fisiche del dispositivo non più ottimali per l'uso previsto.

Dopo l'uso, il prodotto può rappresentare un potenziale rischio biologico. Maneggiare e smaltire il prodotto in conformità con le prassi mediche accettate e con tutte le leggi e le normative locali applicabili.

Se, durante l'uso di questo dispositivo o in conseguenza del suo utilizzo, si verificasse un inconveniente grave, segnalare la problematica al produttore e all'autorità nazionale competente.

SMALTIMENTO

Per lo smaltimento, attenersi alle normative locali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Distribuito da:

ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
1-800-422-8811



UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK

ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

Italia 800 930 930

www.convatec.com

© 2022 ConvaTec Inc.