




Stomahesive®

PLACCA PERISTOMALE
per colostomia, ileostomia e urostomia



- Conserva la pelle e la protegge dalle irritazioni nella zona peristomale e perifistolare.
- Offre una confortevole e sicura base per l'applicazione dei raccoglitori.
- Aderisce perfettamente alla superficie della pelle anche in presenza di cicatrici o di pieghe cutanee.
- Non è irritante, non è allergizzante e per la perfetta aderenza alla cute può restare in loco per lunghi periodi di tempo (7 giorni o più).
- E' di facile, pratico impiego e consente un notevole risparmio di tempo e materiale di medicazione.

ISTRUZIONI PER L' APPLICAZIONE DELLO STOMAHESIVE®


ATTENZIONE: E' necessario prestare la massima attenzione quando si impiegano prodotti adesivi intorno ad uno stoma retratto, specialmente quando associato a megaureteri ed in assenza di un reservoir urinario. In alcuni rari casi è stata riscontrata la presenza di sostanze adesive nel sistema di raccolta renale di questi pazienti. In caso di riscontro di una massa nel tratto urinario, valutare se continuare ad usare il prodotto adesivo ed iniziare un adeguato trattamento clinico.

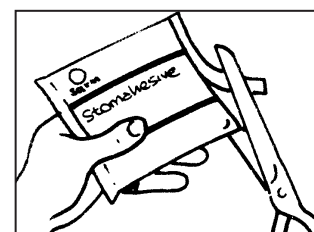


1 Aprite la busta e prelevate la placca di Stomahesive®. (Nel caso di busta in plastica, tagliare un lembo).

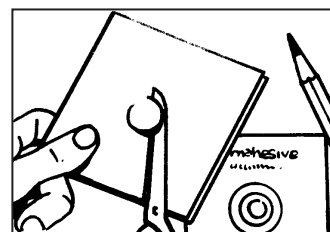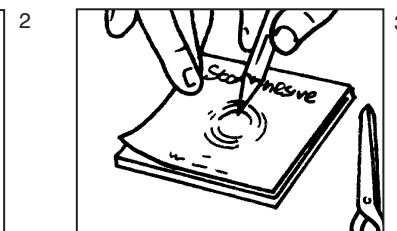

4 In caso di stoma non sporgente fate un foro nella placca dello stesso diametro dello stoma (utilizzando il foglio guida accluso alla confezione, fig. 2-3)

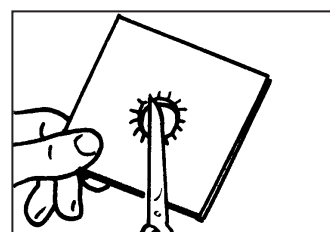


5 In caso di stoma sporgente fate un foro nella placca di circa 2-3 mm più piccolo del diametro dello stoma (utilizzando il foglio guida accluso alla confezione) e quindi praticate alcune fenditure radiali lunghe 6-7 mm ed egualmente distanziate al fine di fare aderire lo Stomahesive® alla base dello stoma sporgente.

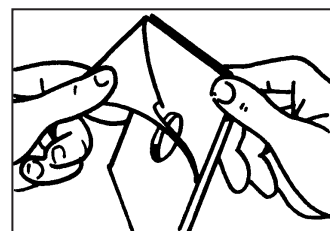


6 Asportate il foglio di carta dalla parte posteriore della placca di Stomahesive®. Se la pelle è molto secca, inumidite leggermente con acqua la superficie adesiva della placca stessa.




7 Applicare quindi delicatamente e nella giusta posizione questo lato dello Stomahesive® sulla zona peristomale esercitando una leggera pressione per 30 secondi.

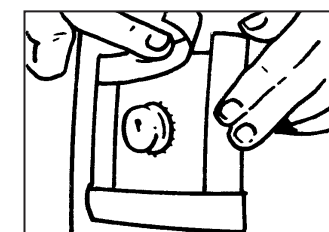


8 Tagliate quattro strisce di un cerotto adesivo Micropore (reperibile in commercio) e applicatele in modo da assicurare ulteriormente i bordi della placca di Stomahesive® alla cute.

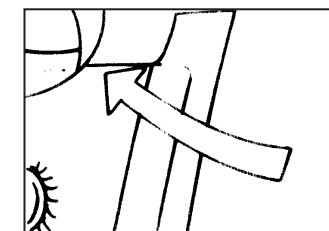

9 Lo Stomahesive®, così fissato nella zona peristomale, offre una sicura base per l'applicazione dei vari tipi di sacchetti raccoglitori secondo le seguenti modalità:

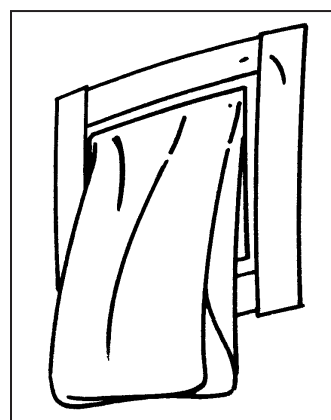

10 sacchetti raccoglitori dotati di una parte adesiva: fate aderire direttamente la parte adesiva alla placca di Stomahesive® (si consiglia l'impiego di sacchetti con superficie adesiva inferiore a quella dello Stomahesive®). Quando si effettua il cambio del sacchetto è necessario staccarlo dall'alto in basso con delicatezza al fine di lasciare in loco la placca di Stomahesive®.

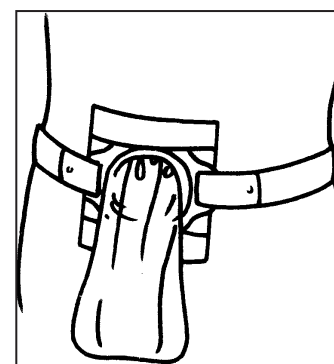


12 Normali sacchetti raccoglitori da agganciare ad una flangia posta sulla placca di Stomahesive®, e tenuta in loco da una apposita cintura.

Il presente dispositivo è esclusivamente monouso e non deve essere riutilizzato. Il riutilizzo può comportare un aumento del rischio di infezioni o di contaminazione crociata. Il riutilizzo può rendere le proprietà fisiche del dispositivo non più ottimali per l'uso previsto.

Dopo l'uso, il prodotto può rappresentare un potenziale rischio biologico. Maneggiare e smaltire il prodotto in conformità con le prassi mediche accettate e con tutte le leggi e le normative locali applicabili.

Se, durante l'uso di questo dispositivo o in conseguenza del suo utilizzo, si verificasse un inconveniente grave, segnalare la problematica al produttore e all'autorità nazionale competente.

La Direzione Informazione Medica è vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

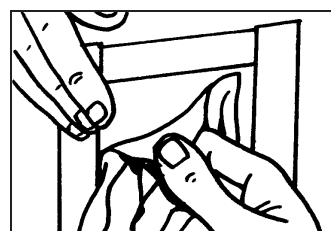

11

Stomahesive®

COMPOSIZIONE

Lo STOMAHESIVE® è una placca dotata di un partico potere adesivo, estremamente modellabile e non allergizzante.

E' costituito da gelatina, pectina, carbosimetilcellulosa sodica e poliisobutilene.

La parte superiore è ricoperta da una pellicola impermeabile di polietilene, mentre la parte adesiva è protetta da una pellicola di carta asportabile.

Uso previsto: Fornire protezione per la cute peristomale riempiendo irregolarità e depressioni cutanee per migliorare l'adesione dei sistemi per stomia.

Indicazioni per l'uso: Per uso con colostomia, ileostomia o urostomia.

CONFEZIONE

Scatola da 5 placche (10x10cm).

Ogni placca è contenuta in una busta di polietilene sterilizzata per irradiazione.

ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
1-800-422-8811

ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

Italia 800 930 930
www.convatec.com

EC REP UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK

© 2022 ConvaTec Inc.

Revised 2022-05
1001122V1



it ITALIANO



Stomahesive®

PLACCA PERISTOMALE
per colostomia, ileostomia e urostomia



Monouso



Dispositivo medico



Importatore



Contiene materiale biologico di origine animale

ISTRUZIONI PER L'USO