

Poche de jambe à usage unique



Prélèvement possible
sans aiguille



Se laver les mains
avant utilisation



Mise en garde



Date de péremption



Ne pas réutiliser



Conserver au sec



Numéro de lot



Ne contient pas
de latex de
caoutchouc naturel



Numéro de
référence



Dispositif médical



Importateur



Consulter le
mode d'emploi



Représentant autorisé
dans l'Union Européenne

Produits concernés par cette notice :

Code REF	Description	Quantité par boîte
508714	Poche de jambe 500 ml Careline™	30
508715	Attache Careline™	2

Notice d'utilisation

Des instructions relatives à l'utilisation de votre poche de jambe accompagnées d'explications sur la fixation à une sonde urinaire sont indiquées ci-dessous, ainsi que des instructions relatives à la vidange et à l'élimination des poches. Ces instructions incluent également l'utilisation des attaches Careline™ non stériles réutilisables.

Les poches de jambe Careline™ sont non stériles et sont fournies avec un tube court. Les poches de nuit standard sont non stériles et sont fournies avec un tube long. Les tubes courts sont à placer au niveau de la

cuisse et les tubes longs sont à placer sur la partie inférieure de la jambe.

Le choix de la poche dépendra de ce qui est le plus approprié pour vous. Veuillez demander conseil à votre médecin ou infirmière.

Si vous avez une sonde urinaire, des infections peuvent survenir par pénétration de bactéries dans votre système urinaire de manière rétrograde par la sonde ou par la tubulure de la poche. Cela peut être contrôlé en utilisant des

mesures d'hygiène simples. L'hygiène est un facteur important.

Lavez-vous toujours les mains avant et après chaque changement ou vidange de la poche. Conservez les poches de drainage dans un endroit frais et sec.

Les volumes indiqués sur la poche sont approximatifs.

Ne pas utiliser si l'emballage unitaire est ouvert ou endommagé.

A. Fixation d'une poche de jambe Careline™

Pour installer une poche de jambe à une sonde.



- Toujours se laver les mains avant et après le changement ou la vidange de la poche.
- Ouvrir l'emballage unitaire.
- Faire passer les attaches Careline™ à travers les œillets de la poche comme indiqué, en s'assurant que la sangle en silicone soit placée face à la jambe. (Fig. 1)

Les attaches sont conçues pour être réutilisées et elles peuvent être lavées à l'eau chaude avec du savon jusqu'à 10 fois. Assurez-vous que le velcro est scellé avant le lavage.

- Retirer le bouchon protecteur du connecteur de la partie supérieure de la poche (tube d'admission).
- Insérer l'extrémité de la sonde urinaire. Ne laissez pas l'extrémité de la sonde ou le tube d'admission rentrer en contact avec d'autres objets ou le sol car cela pourrait entraîner un transfert de bactéries. S'assurer que la sonde est correctement insérée et que le robinet de la poche de jambe est en position «fermée».

N.B. Toutes les poches munies d'un robinet se trouvent dans la position «fermée» lorsqu'elles sont livrées. (Fig. 2)

- Fixer les attaches à votre jambe de manière à ce que cela soit confortable, ne pas trop serrer. Le robinet est en position fermée lorsque son extrémité est poussée vers la gauche. (Fig. 2)

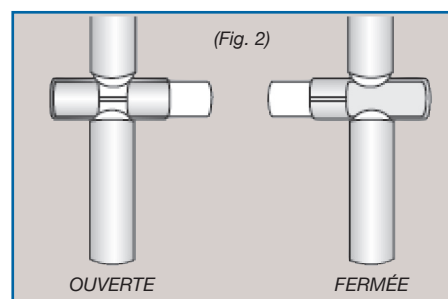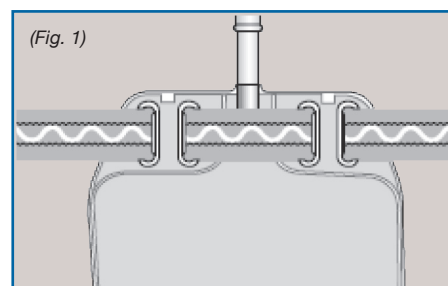

Pour s'adapter davantage à l'utilisateur, le tube d'admission de la poche Careline™ peut être découpé à la longueur souhaitée.

Mesurer la longueur de tube souhaitée et raccourcir le tube à l'aide de ciseaux si nécessaire. (Fig. 3)

Les poches de jambe Careline™ sont livrées avec un raccord. Installer le raccord fourni. Veiller à bien pousser le tube d'admission jusque sous le bord du raccord. (Fig. 4)



B. Système clos - Fixation d'une poche de nuit à une poche de jambe

Toutes les poches de jambe Careline™ peuvent être raccordées à une poche de nuit standard.

- Ne pas déconnecter la poche de jambe de la sonde.
- Se laver les mains.
- Connecter fermement une poche de nuit à une poche de jambe, en insérant le connecteur de la poche de nuit dans le tube en silicone du robinet de vidange de la poche de jambe.
- Une fois la connexion établie, ouvrir le robinet de la poche de jambe pour permettre le drainage urinaire dans la poche de nuit.

Il est conseillé d'utiliser un pied de maintien Careline™ ou un crochet de suspension pour maintenir la poche de nuit.

NB. Avant chaque utilisation, vérifier que les connexions sont sécurisées.

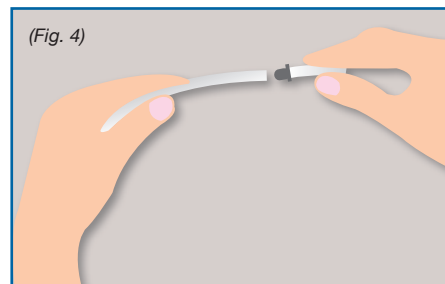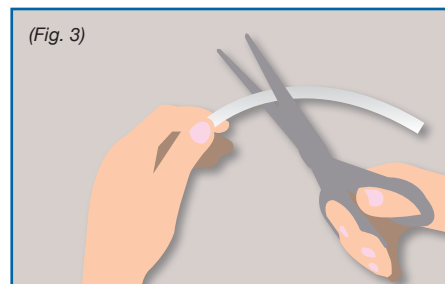

C. Retrait/Vidange et Elimination des poches de drainage utilisées

Retrait/Vidange des poches de nuit

- Si la poche de nuit est connectée à une poche de jambe, fermer le robinet de la poche de jambe et déconnecter la poche de nuit.
 - Si la poche de nuit est connectée directement à une sonde, la retirer.
- N.B. le robinet de la poche de nuit étant en position fermée.

Retrait/Vidange des poches de jambe

- Déconnecter la poche de jambe de la sonde.
- Mettre la poche à urine dans l'urinoir ou aux toilettes et ouvrir le robinet de vidange.

Elimination des poches

- Assurez-vous que vos poches sont vides avant élimination.
- Certaines autorités locales offrent un service de collecte de produits souillés, contactez votre médecin généraliste pour plus de détails.
- Si les poches doivent être jetées avec les ordures ménagères, elles doivent être vidées et enveloppées dans plusieurs couches de papier journal ou dans un sac en plastique scellé en toute sécurité avant d'être mis à la poubelle.
- Les produits usagés ne doivent pas être brûlés dans un feu domestique.

Important : ne pas se débarrasser des poches usagées dans les toilettes, car cela pourrait causer un blocage des canalisations.


Ce dispositif est destiné à un usage unique et ne doit pas être réutilisé. La réutilisation peut conduire à un risque accru d'infection ou de contamination croisée. Les propriétés physiques du produit ne pourraient ne plus être optimales pour l'utilisation prévue.

Ce dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé. Toute réutilisation peut entraîner un risque accru d'infection ou de contamination croisée. Les propriétés physiques du dispositif risquent de ne plus être optimales pour l'usage prévu.

Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

Après utilisation, ce produit peut présenter un danger biologique potentiel. Manipuler et éliminer conformément aux pratiques médicales reconnues et aux lois et règlements locaux en vigueur.

Fabricant :
ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

EC REP
 UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK

Distribué par :
Laboratoires ConvaTec
90 Boulevard National
92250 La Garenne-Colombes