

Durahesive®

Convex con aro

Apósito convexo flexible
autoadhesivo con aro de conexión

Instrucciones de uso



No reutilizar



Precaución



Consulte las instrucciones de uso

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN



Límite de temperatura



Mantener seco

LOT Número de lote.



Fecha de caducidad

Para el cuidado de ostomías.

Este producto es para un solo uso y no debe reutilizarse. Su reutilización puede aumentar el riesgo de infección o contaminación cruzada. Las propiedades físicas del producto podrían ya no ser óptimas para el uso previsto.

Si sucede algún incidente grave mientras se usa este producto o tras su uso, comuníquelo al fabricante y a la autoridad nacional pertinente.

Tras su uso, este producto puede suponer un riesgo biológico. Utilícelo y deséchelo de acuerdo con las prácticas médicas aceptadas y la legislación y los reglamentos locales.

Uso previsto: Manejo de las excreciones del estoma.



Indicaciones de uso: Para usar con una colostomía, ileostomía o urostomía.

PREPARACIÓN DEL APÓSITO

La piel periestomal **debe** estar limpia y seca. Evitar el uso de disolventes o cremas.




Debido a que los apósitos son precortados, escoja un apósito cuyo diámetro sea idéntico o superior al diámetro del estoma. **No agrande la apertura del orificio precortado.** Retire el papel siliconado.

APLICACIÓN DEL APÓSITO

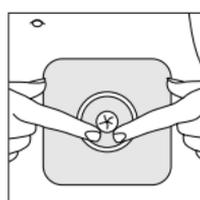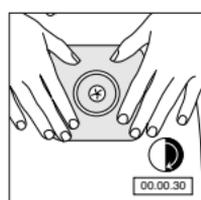


Asegúrese que la adherencia alrededor del estoma sea satisfactoria.

APLICACIÓN DE LA BOLSA

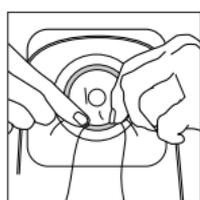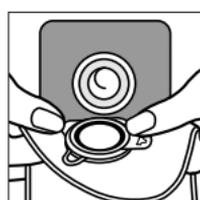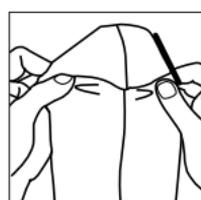

Este producto puede mantenerse aplicado durante el baño, la ducha o la práctica de la natación. Cubrir el filtro con los adhesivos protectores adjuntos. Seque inmediatamente la bolsa con una toalla.


RETIRADA DE LA BOLSA

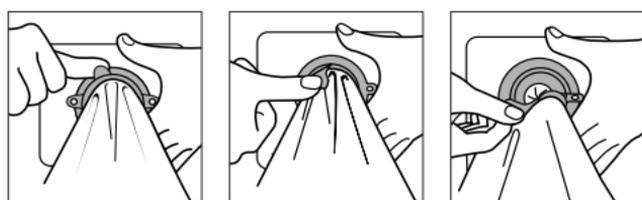


RETIRADA DEL APÓSITO




UTILIZACIÓN DE LA PINZA DE CIERRE

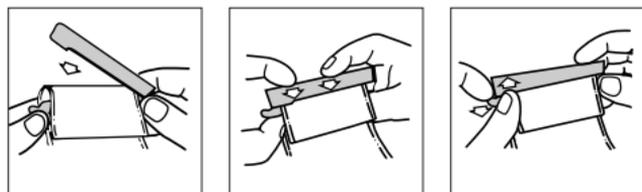


UTILIZACIÓN DE LA LLAVE DE VACIADO ACCUSEAL®

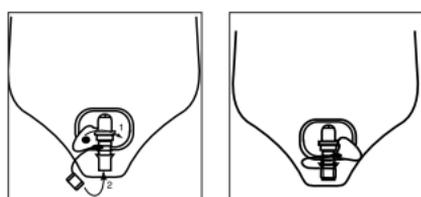


Para conectar a una bolsa de drenaje nocturno:

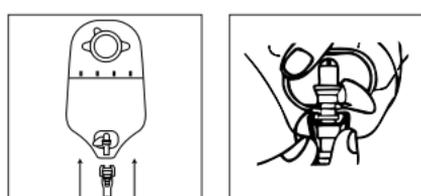

UTILIZACIÓN DEL CIERRE DE VACIADO EN LAS BOLSAS DE UROSTOMÍA

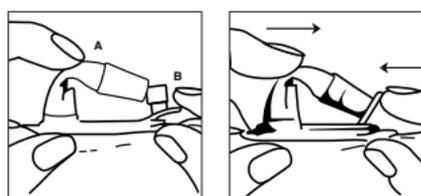

Para conectar a una bolsa de drenaje nocturno:

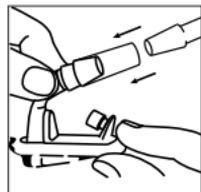

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Observar la normativa vigente al respecto.

Advertencia: En caso de irritación, consultar con un profesional sanitario.



Producto sanitario



Importador

Distribuido por:



ConvaTec

ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
1-800-422-8811

España 93 6023700



ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK



UNOMEDICAL A/S



Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK

© 2021 ConvaTec Inc.

® Marca registrada de ConvaTec Inc.