

Stomahesive Flexible con aro Pediátrico

Apósitos Flexibles autoadhesivos
con aro de conexión

Instrucciones de uso

es ESPAÑOL



Uso previsto: Manejo de las excreciones del estoma.


Indicaciones de uso: Para usar con una colostomía, ileostomía o urostomía.

PRECAUCIÓN


Se debe tener cuidado cuando se usen productos adhesivos alrededor de una urostomía al ras, especialmente cuando se asocia con megauréteres y ausencia de un depósito urinario. En raras ocasiones, los informes clínicos han documentado la presencia del agente adhesivo en el sistema de recolección renal de estos pacientes. En caso de descubrirse una masa en el tracto urinario, se debe evaluar la continuación del uso del producto adhesivo e iniciar el tratamiento clínico apropiado.

PREPARACIÓN DEL APÓSITO

La piel periestomal debe estar limpia, seca y libre de disolventes ó sustancias grasas.

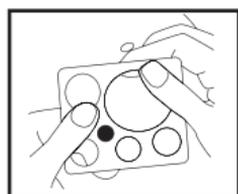

Escoger un apósito cuyo diámetro sea al menos 6-10 mm superior al diámetro del estoma.

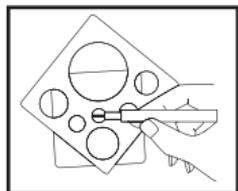

Dibujar la forma exacta del estoma sobre el papel protector de la cara posterior del apósito.





Recortar siguiendo la línea del dibujo, dejando al menos 5 mm de protector cutáneo entre el orificio y el aro. Retirar el papel protector.

PRECAUCIÓN:

En ocasiones el soporte adhesivo del apósito puede causar irritación de la piel, especialmente si se llevan pañales. Recortar cuidadosamente el soporte adhesivo alrededor del aro. Ésta práctica se recomienda cuando la irritación aparece bajo el soporte adhesivo.




Durante la aplicación de las bolsas, es importante aplicar una presión muy delicada sobre el abdomen del niño. Para evitar una presión excesiva, conectar la bolsa al apósito antes de aplicar éste sobre de abdomen, o bien utilizar un sistema de una pieza.

APLICACIÓN DEL APÓSITO

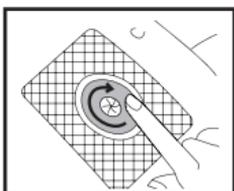
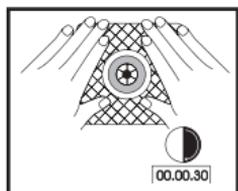


Asegurar una buena fijación alrededor del estoma.


APLICACIÓN DE LA BOLSA

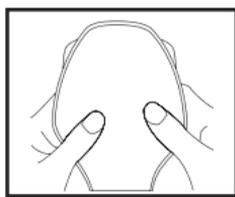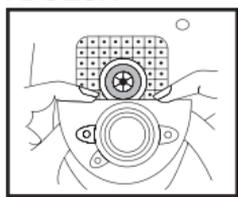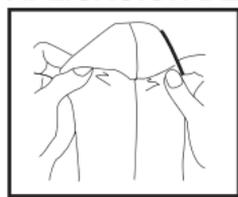




RETIRADA DE LA BOLSA

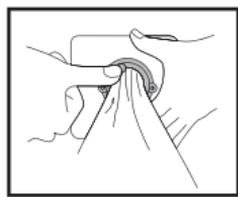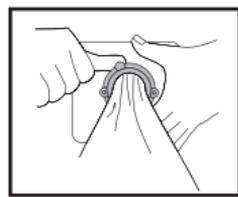



RETIRADA DEL APÓSITO

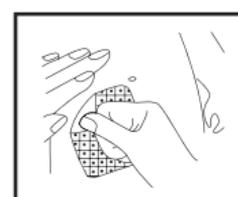


UTILIZACIÓN DE LA PINZA DE CIERRE

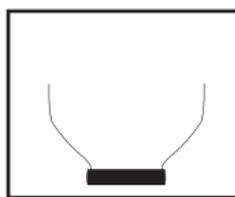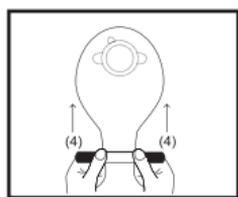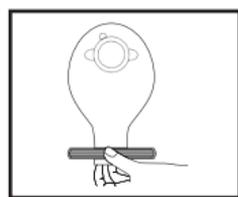

COMO UTILIZAR EL CIERRE DE SEGURIDAD EN LAS BOLSAS DE UROSTOMÍA

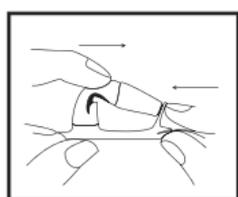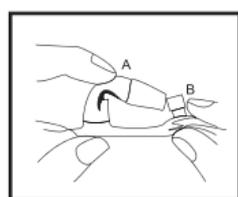

Para conectar a una bolsa de drenaje nocturno

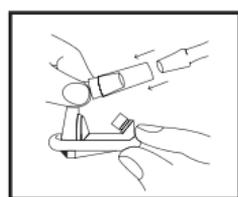

El producto puede permanecer aplicado durante el baño, la ducha o la práctica de la natación. Secar inmediatamente después de una exposición al agua.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto es para un solo uso y no debe reutilizarse. Su reutilización puede aumentar el riesgo de infección o contaminación cruzada. Las propiedades físicas del producto podrían ya no ser óptimas para el uso previsto.

Si sucede algún incidente grave mientras se usa este producto o tras su uso, comuníquelo al fabricante y a la autoridad nacional pertinente.

Tras su uso, este producto puede suponer un riesgo biológico. Utilícelo y deséchelo de acuerdo con las prácticas médicas aceptadas y la legislación y los reglamentos locales.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN



MD Producto sanitario



Importador

Nota: en caso de irritación de la piel, consulte a un profesional sanitario.

Distribuido por:
ConvaTec Inc.
Greensboro, NC 27409
1-800-422-8811

EC REP



UNOMEDICAL A/S
Aaholmvej 1-3, Osted
4320 LEJRE DENMARK

España 93 6023700

ConvaTec Limited
First Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

www.convatec.com

© 2021 ConvaTec Inc.

®/™ Marcas registradas de ConvaTec Inc.

Revised 2021-07
1156926V1