

# COMBIHESIVE<sup>®</sup>

## Collecteur d'urines

(fr) FRANÇAIS

Mode d'emploi

**Contenu** : 1 système de recueil de nuit Combihesive

### INDICATIONS

À utiliser avec une urostomie.

### UTILISATION PRÉVUE

Recueil de l'urine.


**Remarque:** Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

Ce dispositif est à usage unique et ne doit pas être réutilisé. Toute réutilisation peut entraîner un risque accru d'infection ou de contamination croisée. Les propriétés physiques du dispositif risquent de ne plus être optimales pour l'usage prévu.


### MODE D'EMPLOI

A la livraison, la fermeture du dispositif de vidange du collecteur d'urines est ouvert.

#### Fermer le dispositif avant usage

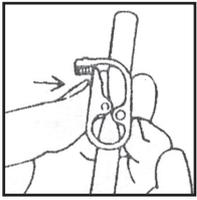

Pour fermer presser sur la pince auto-bloquante.

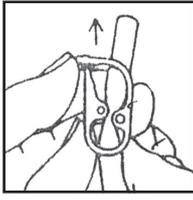

Pour ouvrir libérer la pince en poussant sur la partie crantée.

#### Attacher la poignée de transport

Installer le collecteur d'urines dans les quatre crochets de la poignée. Engager le tube de drainage dans les ergots guides de la poignée.

### DESTRUCTION

Après utilisation, ce produit peut présenter un danger biologique potentiel. Manipuler et éliminer conformément aux pratiques médicales reconnues et aux lois et règlements locaux en vigueur.

### CONDITIONS DE STOCKAGE



Ne pas réutiliser



Importateur



Consulter le mode d'emploi



Dispositif médical

 ConvaTec

 ConvaTec Limited  
First Avenue, Deeside Industrial Park  
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

 UNOMEDICAL A/S  
Aaholmvej 1-3, Osted  
4320 LEJRE DENMARK

France 00.33.1.56.47.18.00

www.convatec.com

© 2021 ConvaTec Inc.

®/™ indicates a trademark of ConvaTec Inc.

Revised 2021-07  
1177375V1